



Beipackzettel online - ein Service Ihrer Versandapotheke mycare.
Pharmazeutische Fachkräfte unserer Apotheke beraten Sie gern zu Fragen
rund um das Produkt - per E-Mail: service@mycare.de oder per Telefon:
0800-8770120 gebührenfrei. Alle Informationen: www.mycare.de

[Zum Produkt »](#)



ALLERGIE 2 in 1 Nasenspray & Spülung

Liebe Kundin, lieber Kunde, vielen Dank, dass Sie sich für **STÉRIMAR™ ALLERGIE** entschieden haben.

Die Nase hat viele lebenswichtige Funktionen. Die Nase ist ein Teil der oberen Atemwege und hat eine große Bedeutung für die Atmung. Sie erfüllt in gesundem Zustand die Funktion, die eingeatmete Luft aufzuwärmen, anzufeuchten und zu filtern. Zu diesem Zweck ist die Nase mit einer gut durchbluteten Schleimhaut ausgestattet. Die Nase ist ein wichtiger Bestandteil der Immunabwehr, denn sie filtert Krankheitserreger und Allergene aus der Atemluft. Zugleich ist sie ein Sinnesorgan und trägt wesentlich zum Geruchs- und Geschmackssinn bei. Wenn sie verstopft ist, kann die Nase ihre Funktionen nicht mehr erfüllen.

Seit 1975 stellt **STÉRIMAR™**, ein Pionier der Nasenhygiene, sein Wissen über das Meer und dessen natürliche Ressourcen in den Dienst der Nasengesundheit.

STÉRIMAR™ ALLERGIE ist ein Medizinprodukt, das für Babys, Kinder und Erwachsene geeignet ist. Das gefilterte, natürliche und konservierungsmittelfreie **STÉRIMAR™**-Meerwasser nutzt die anerkannten Eigenschaften der darin enthaltenen Mineralien und Spurenelemente. Das Meerwasser wird an der Atlantikküste aus der Bucht von Cancale (Bretagne, Frankreich), einem besonderen, geschützten Lebensraum, der für seine saubere Umwelt bekannt ist, entnommen und ist nach Prüfung seiner physiologischen Reinheit gebrauchsfertig.



STÉRIMAR™ ALLERGIE

- Reduziert akute Allergie-Schübe um 42 %*
- Macht nicht müde

 **SOFIBEL Laboratoires Fumouze**
110-114, rue Victor Hugo
92686 Levallois-Perret Cedex – France

 Vertrieb: Church & Dwight UK Ltd.,
Folkestone, Kent, CT19 6PG

 Übersetzungsbüro
Robert und Janet Ball,
Starenweg 8, 89257 Illertissen

*M. Grasso et al., Drug Design,
Development and Therapy, 2018, 12:705-709

www.sterimar.de



R 09-2022
108975-1



ALLERGIE 2 in 1 Nasenspray & Spülung

ANWENDUNGSGEBIETE:

STÉRIMAR™ Allergie ist eine isotonische Lösung aus Meerwasser mit ähnlicher Salzkonzentration wie die der Zellen des menschlichen Körpers. Die natürliche und konservierungsmittelfreie **STÉRIMAR™** Meerwasserlösung nutzt die anerkannten Eigenschaften von Mineralsalzen sowie Spurenelementen aus dem Meer und ist mit Mangan angereichert. Empfohlen für Kinder und Erwachsene zur:

- Reinigung und Entfernung von Allergenen aus der Nasenschleimhaut
- Reduzierung akuter Allergieschübe um 42 %*

STÉRIMAR™ Allergie wird für die Anwendung von Beginn der Allergiesaison an empfohlen.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:

Vor der ersten Anwendung einmal in die Luft sprühen, dann ist das Spray gebrauchsfertig.

Als Spray: Kopf gerade halten und den Sprühkopf in das Nasenloch einführen. Einem oder zwei Sprühstöße in jedes Nasenloch geben. Überschüssige Lösung aus der Nase laufen lassen und dann die Nase putzen.



Als Spülung: Den Kopf zur Seite neigen, den Sprühkopf in das obere Nasenloch einführen und für 2 bis 3 Sekunden gedrückt halten. Überschüssige Lösung aus dem anderen Nasenloch laufen lassen und dann die Nase putzen.



Nach jedem Gebrauch den Sprühkopf mit heißem Wasser reinigen.

Zur Vermeidung der Übertragung von Krankheitserregern sollte jede Flasche immer nur von einem Anwender angewendet werden.

DOSIERUNG: Je nach Bedarf 2- bis 6-mal täglich anwenden.

HINWEISE: **STÉRIMAR™** kann in jeder Position sicher angewendet werden (360° Sprüh-Anwendung). Die Sprühdüse ist sowohl für Kinder als auch für Erwachsene geeignet.

Aseptisch verpackt. Behälter wird mit Inertgas (Stickstoff) unter Druck gesetzt. Die Lösung befindet sich in einem Innenbehälter und kommt nicht mit dem Stickstoff in Berührung.



ZUSAMMENSETZUNG: 31,82 ml Meerwasser, Mangansalz-Monohydrat, Gereinigtes Wasser q.s. 100 ml.

Aseptisch verpackt. Inertes Treibgas: Stickstoff. Die Lösung kommt nicht mit Stickstoff in Kontakt.

Nettovolumen: **50 ml** e  89 PZN: 18063805

Nettovolumen: **100 ml** e  175 PZN: 17617199

WARNHINWEISE:

Druckbehälter kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenem Feuer und anderen Zündquellen fernhalten. Beim Gebrauch nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenlicht schützen. Keinen Temperaturen über 50 °C aussetzen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

*M. Grasso et al., Drug Design, Development and Therapy, 2018, 12:705-709



50 ml PZN-18063805
100 ml PZN-17617199



1089 7515