



Beipackzettel online - ein Service Ihrer Versandapotheke mycare.

Pharmazeutische Fachkräfte unserer Apotheke beraten Sie gern zu Fragen rund um das Produkt - per E-Mail: [service@mycare.de](mailto:service@mycare.de) oder per Telefon: 0800-8770120 gebührenfrei. Alle Informationen: [www.mycare.de](http://www.mycare.de)

[Zum Produkt »](#)

# Gebrauchsanweisung

## BIOLAN® gel

Augentropfen mit Natriumhyaluronat 0,3 %

### BESCHREIBUNG


**BIOLAN® gel** bildet einen sterilen, konservierungsmittelfreien, viskoelastischen, klaren Schutzfilm für die Hornhaut. **BIOLAN® gel** enthält Natriumhyaluronat, das Natriumsalz der Hyaluronsäure, das aufgrund seiner besonderen physikalischen Eigenschaft einen gleichmäßigen, stabilen und besonders lang haftenden Schutzfilm auf der Hornhaut bildet, ohne die Sehleistung zu beeinträchtigen. Dadurch bewirkt **BIOLAN® gel** lang anhaltende Linderung bei Beschwerden in Zusammenhang mit

- mechanischer Beanspruchung, z. B. beim Tragen harter oder weicher Kontaktlinsen oder bei diagnostischen Eingriffen am Auge,
- Umweltstress, z. B. durch Klimaanlage, Wind, Kälte, Trockenheit oder Luftverschmutzung beispielsweise durch Zigarettenrauch, oder
- bei strapazierten Augen, z.B. bei der Arbeit an Computerbildschirmen, Mikroskopen sowie bei langen Autofahrten.

Aufgrund seiner Konservierungsmittelfreiheit ist **BIOLAN® gel** auch bei längerfristiger Anwendung besonders gut verträglich. **BIOLAN® gel** ist auch für Kontaktlinsenträger geeignet. Die Kontaktlinsen müssen bei der Anwendung der Augentropfen nicht entnommen werden.

### ANWENDUNG

Trennen Sie ein Ein-Dosis-Behältnis ab. Vergewissern Sie sich, dass jedes Ein-Dosis-Behältnis unbeschädigt ist. Zum Öffnen drehen Sie das flache Ende des Ein-Dosis-Behältnisses ab (nicht ziehen). Legen Sie den Kopf etwas zurück, sehen Sie nach oben und ziehen Sie das Unterlid leicht vom Auge ab und geben Sie 3 - 5 mal täglich einen Tropfen in den Bindehautsack des Auges. Schließen Sie langsam die Augen, damit sich die Flüssigkeit gleichmäßig auf der Oberfläche des Auges verteilen kann. Wenn sich die Beschwerden verschlimmern sollten oder keine Besserung eintritt, suchen Sie Ihren Augenarzt auf.

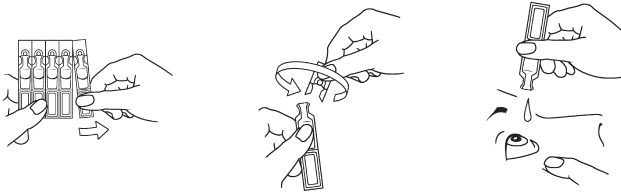

### ZUSAMMENSETZUNG

1 ml enthält: Natriumhyaluronat 0,3 %, Natriumchlorid, Natriummonohydrogenphosphat, Natriumdihydrogenphosphat, Wasser für Injektionszwecke.

### PACKUNGSGRÖSSEN


Verkaufseinheiten: Ein-Dosis-Behältnisse, 20 x 0,45 ml und 60 x 0,45 ml

## VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARNHINWEISE


- Nicht verwenden bei beschädigtem Ein-Dosis-Behältnis.
- Das Auge mit dem Ein-Dosis-Behältnis nicht berühren.
- Nicht anwenden bei einer bestehenden Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.
- Nur zur einmaligen Anwendung bestimmt; da **BIOLAN® gel** keine Konservierungsmittel enthält, dürfen Reste der Lösung nicht mehr verwendet werden.
- Falls Sie zusätzlich andere Augentropfen/Augensalben anwenden, sollte ein Anwendungsabstand von 15 Minuten eingehalten werden. **BIOLAN® gel** sollte dann immer zuletzt verabreicht werden.
- Nicht an infizierten oder verletzten Augen anwenden.
- Nach der Anwendung kann vorübergehend die Sehschärfe verringert sein; in diesem Fall kein Fahrzeug lenken, keine Maschinen bedienen und warten, bis die normale Sehschärfe wieder eingetreten ist.
- Verwenden Sie die Augentropfen nicht nach Ablauf des Verfallsdatums. Dieses finden Sie auf jedem Ein-Dosis-Behältnis sowie auf der Faltschachtel eingeprägt.
- **BIOLAN® gel** enthält Phosphatpuffer. Bei längerfristiger Anwendung und bei Funktionsstörungen der Hornhaut kann die Anwendung von **BIOLAN® gel** zu Ausfällungen von Kalziumsalzen in der Hornhaut führen.


## LAGERUNG


Bei 2 °C bis 25 °C lagern. Vor Frost schützen. Ein-Dosis-Behältnisse vor Licht geschützt im Originalkarton aufbewahren.


**LOT** Chargen-Nummer und  "verwendbar bis" sind auf dem Ein-Dosis-Behältnis eingeprägt.


**STERILE A** Aseptische Herstellung.

 Nur zum Einmalgebrauch.

 Beschreibung und Art der Anwendung siehe beigefügte Geruchsabweisung.

 25 °C  
2 °C Lagerungstemperatur.

 Nicht verwenden bei beschädigtem Ein-Dosis-Behältnis.

 Hersteller:  
Penta Arzneimittel GmbH  
Werksstrasse 3  
92551 Stulln  
Germany

Vertrieb in Deutschland:  
Santen Oy  
Niittyhaankatu 20  
33720 Tampere, Finnland

Ansprechpartner:  
Santen GmbH  
Erika-Mann-Str.21,  
80636 München

Stand der Information: 09/2020

 0483