



RC-CORNET® ADAPTER MIT MUNDSTÜCK

Zur Kombination von Atemphysiotherapie und Inhalationstherapie mit dem RC-Cornet® / RC-Cornet® N




Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des RC-Cornet® Adapters mit Mundstück die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Beachten Sie auch weiterhin die Gebrauchsanweisung Ihres Verneblers (der Vernebler muss separat erworben werden).

CEGLA
MEDIZINTECHNIK



R. Cegla GmbH & Co. KG
Horresser Berg 1
56410 Montabaur
Germany
Tel +49 2602 9213-0
info@cegla.de
www.cegla.de

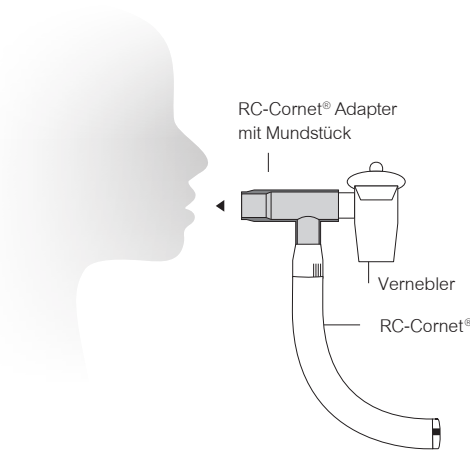


ANWENDUNG I

für die Kombi-Therapie der unteren Atemwege

Der RC-Cornet® Adapter verbindet das Basis-cornet mit allen gängigen Verneblern. Ziehen Sie zuerst das Mundstück des Verneblers ab. Verbinden Sie nun den RC-Cornet® Adapter mit Mundstück mit dem Vernebler, sodass er fest aufsitzt (s. Skizze). Bitte beachten: Das Mundstück des Verneblers muss abgezogen werden. Stellen Sie das gewünschte Druckprofil am RC-Cornet® durch Verdrehen des Mundstücks am Krümmer ein.

Umschließen Sie mit den Lippen das Mundstück des RC-Cornet® Adapters mit Mundstück, inhalieren Sie bei der Einatmung das Aerosol ein und atmen Sie gegen den entstehenden oszillierenden Widerstand aus.

Empfohlene Anwendungshäufigkeit der Kombi-Therapie: 2–3 x täglich 2–5 Minuten (bei starker Verschleimung auch häufiger).

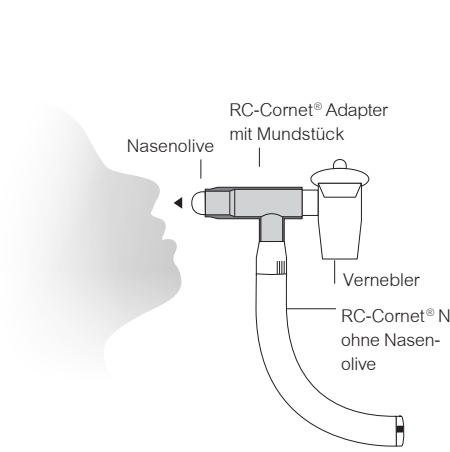

ANWENDUNG II

für die Kombi-Therapie der oberen Atemwege

Der RC-Cornet® Adapter verbindet das Nasen-cornet mit allen gängigen Verneblern. Ziehen Sie die Nasenolive aus dem RC-Cornet® N. Setzen Sie diese in den RC-Cornet® Adapter und anschließend den umgerüsteten Adapter auf das Cornet. Verbinden Sie dieses System mit dem Vernebler, sodass es fest aufsitzt (s. Skizze). Bitte beachten: Das Mundstück des Verneblers muss abgezogen werden. Stellen Sie das gewünschte Druckprofil (Einstellung Pos. 0–1) am RC-Cornet® durch Verdrehen des Mundstücks am Krümmer ein. Verschließen Sie ein Nasenloch mit dem Zeigefinger und drücken Sie die Nasenolive des RC-Cornet® Adapters in das andere Nasenloch. Atmen Sie nun das Aerosol über die Nasenolive ein und erzeugen Sie beim Ausatmen über die Olive die heilsamen Druckschwankungen / Vibrationen im Nasen-Rachen-Raum.

Empfohlene Anwendungshäufigkeit der Kombi-Therapie: 2–3 x täglich 2–5 Minuten (bei starker Verschleimung auch häufiger).

REINIGUNG

Den RC-Cornet® Adapter mit Mundstück können Sie wie folgt reinigen:

- im RC-Clean Reinigungsbeutel für die Mikrowelle (separat erhältlich)
- auskochen
- im Vaporisator
- mit Heißdampf: Temperaturen bis 134 °C

Reinigen Sie den RC-Cornet® Adapter mit Mundstück alle 2 Tage!

Der RC-Cornet® Adapter mit Mundstück ist für den Einpatientengebrauch vorgesehen. Eine klinische Wiederaufbereitungsanleitung für den Mehrpatientengebrauch finden Sie unter www.cegla.de

Artikel-Nr. 225 | PZN 01 413 135

Weitere Produkte erhältlich in Apotheken, Sanitätshäusern oder unter www.cegla-shop.de



LATEX FREI



NICHT STERIL



MENGE: 1



225



BEI BESCHÄDIGTER VERPACKUNG NICHT VERWENDEN



GEBRAUCHS-ANWEISUNG BEACHTEN



PHTHALATFREI

