

Gebrauchsanweisung

Bitte aufmerksam lesen.

ArdeyEctoin® Ohrenspray



Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie ArdeyEctoin® Ohrenspray anwenden. BEWAHREN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG AUF, denn sie enthält wichtige Informationen. Wenn Sie weitere Fragen zu ArdeyEctoin® Ohrenspray haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt, Apotheker oder Vertreter.

Was ist ArdeyEctoin® Ohrenspray und wann wird es angewendet?

ArdeyEctoin® Ohrenspray ist ein Medizinprodukt, das Ectoin® enthält. Ectoin® ist ein natürliches Zellschutzmolekül mit entzündungshemmenden und membranstabilisierenden Eigenschaften. ArdeyEctoin® Ohrenspray beruhigt die trockene Haut im äußeren Gehörgang und lindert Juckreiz, der durch entzündliche Hauterkrankungen oder Allergien verursacht wird. Es unterstützt den Regenerationsprozess der trockenen Haut im äußeren Gehörgang. Wenn es regelmäßig genutzt wird, hilft das ArdeyEctoin® Ohrenspray, die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer Otitis externa zu reduzieren. Im Fall einer nicht-infektiösen Otitis externa reduziert es auch Entzündungen. ArdeyEctoin® Ohrenspray reinigt den äußeren Gehörgang. Es unterstützt die Pflege des äußeren Gehörgangs nach dem Tragen von Hörgeräten, In-Ear Kopfhörern oder Ohrstöpseln. ArdeyEctoin® Ohrenspray hilft gegen die Entstehung von Ohrenschmalzpfropfen, wenn es regelmäßig genutzt wird. ArdeyEctoin® Ohrenspray ist eine leicht hypertonische Lösung und unterstützt das Aufweichen des Ohrenschmalzes auf natürliche Weise. ArdeyEctoin® Ohrenspray ist frei von Konservierungsstoffen. Es enthält ausschließlich natürliche Inhaltsstoffe.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- ArdeyEctoin® Ohrenspray sollte nicht genutzt werden in Ohren mit beschädigtem oder perforiertem Trommelfell, bei eingelegtem Paukenröhrchen, offenen Wunden wie z. B. nach einer Operation oder wenn der äußere Gehörgang durch einen Fremdkörper verstopft ist.

- Wenn Sie an einer Mittelohrentzündung oder an einer Ohrenentzündung erkrankt sind, sollten Sie ArdeyEctoin® Ohrenspray nur auf Anraten Ihres Arztes oder medizinischen Fachpersonals anwenden.
- Sprühen Sie keine kalte Lösung in Ihr Ohr, da das Schwindel oder andere Beschwerden hervorrufen kann.
- ArdeyEctoin® Ohrenspray sollte bei Überempfindlichkeit gegen Ectoin® oder einen der anderen Inhaltsstoffe des Sprays nicht angewendet werden.
- Falls es zu allergischen Reaktionen kommen sollte, ist die Anwendung von ArdeyEctoin® Ohrenspray sofort zu beenden.
- Aus hygienischen Gründen sollte dieses Produkt nur von einer Person genutzt werden.
- Nach Anbruch nicht länger als 6 Wochen verwenden.

Was Sie vor der Anwendung von ArdeyEctoin® Ohrenspray wissen sollten

Es sind keine Wechselwirkungen zwischen ArdeyEctoin® Ohrenspray und anderen Ohrensprays oder -tropfen bekannt. Warten Sie nach der Nutzung des ArdeyEctoin® Ohrensprays mindestens 15 Minuten, bevor Sie andere Medizinprodukte oder Arzneimittel an dem behandelten Ohr verwenden. Der Gehörgang sollte immer trocken sein, bevor Sie Hörgeräte, In-Ear Kopfhörer oder Ohrstöpsel nutzen.

Was sollte in der Schwangerschaft und Stillzeit beachtet werden?

Es liegen derzeit keine Daten zur Anwendung von ArdeyEctoin® Ohrenspray während der Schwangerschaft und in der Stillzeit vor. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker vor der Anwendung dieses Medizinproduktes, wenn Sie:

- schwanger sind oder stillen,
- nicht sicher sind, ob Sie schwanger sind.

Wie verwenden Sie ArdeyEctoin® Ohrenspray?

Verwenden Sie ArdeyEctoin® Ohrenspray stets entsprechend dieser Gebrauchsanweisung oder fragen Sie vor der Anwendung Ihren Arzt oder Apotheker,

wenn Sie nicht sicher sind. Wenn nicht anders von Ihrem medizinischen Fachpersonal verordnet, sprühen Sie 1–2 Sprühstöße ArdeyEctoin® Ohrenspray mehrmals täglich in das beeinträchtigte Ohr. Kinder unter 10 Jahren sollten bei der Verwendung von ArdeyEctoin® Ohrenspray Hilfestellung eines Erwachsenen erhalten. Betätigen Sie vor der ersten Nutzung von ArdeyEctoin® Ohrenspray die Pumpe 2–3 mal, um die Luft aus der Pumpe entweichen zu lassen. Sollte das Sprühen nicht einwandfrei möglich sein (was passieren kann, wenn die Flasche nicht aufrecht gehalten wird), betätigen Sie die Pumpe mehrmals in aufrechter Position.

1. Falls sich die Flasche kalt anfühlt wärmen Sie sie auf, indem Sie sie in der Hand halten.
2. Halten Sie die Flasche aufrecht und platzieren Sie Ihren Zeigefinger auf dem Sprühkopf.
3. Sprühen Sie die Lösung in das beeinträchtigte Ohr.
4. Halten Sie Ihren Kopf seitwärts, damit die überflüssige Flüssigkeit herauslaufen kann und trocknen Sie die Ohrmuschel, falls nötig.
5. Reinigen Sie den benutzten Sprühkopf des Ohrensprays mit einem sauberen und flusenfreien Tuch.

Mögliche Nebenwirkungen von ArdeyEctoin® Ohrenspray

ArdeyEctoin® Ohrenspray ist gut verträglich. Bis zum heutigen Zeitpunkt sind keine wiederholt auftretenden oder anhaltenden Nebenwirkungen bekannt. Bitte informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Vertreiber, falls Sie Nebenwirkungen in Zusammenhang mit der Anwendung von ArdeyEctoin® Ohrenspray bemerken. Wenn die Beschwerden nicht abklingen oder sich verschlimmern, sollten Sie Ihren Arzt oder Apotheker konsultieren.

Wie wird ArdeyEctoin® Ohrenspray aufbewahrt?

Das Verfalldatum von ArdeyEctoin® Ohrenspray ist auf der Faltschachtel und auf der Flasche aufgedruckt. ArdeyEctoin® Ohrenspray darf nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden. Bitte lagern Sie ArdeyEctoin® Ohrenspray bei 2–25 °C. ArdeyEctoin® Ohrenspray sollte für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.

Inhalt des ArdeyEctoin® Ohrensprays und weitere Informationen

20 ml Lösung.

Ein Sprühstoß enthält 0,065 ml Lösung.

Zusammensetzung

Ectoin®, Meersalz, Zitratpuffer und Wasser

Hersteller

bitop AG



Stockumer Straße 28, 58453 Witten, Germany

Vertrieb Deutschland

Ardeypharm GmbH

Loerfeldstraße 20, 58313 Herdecke


Telefon: 0 23 30 / 977 677, Fax: 0 23 30 / 977 697


E-Mail: office@ardeypharm.de


Datum der Information: April 2018

Bedeutung der Symbole:


 CE Symbol

 Bitte Gebrauchsanweisung beachten

 Anzuwenden bis (Verfalldatum)

 Achtung, bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung (für wichtige Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen)

 Hersteller

 Lot Nummer

 2°C 25°C
Temperaturgrenzen