



Beipackzettel online - ein Service Ihrer Versandapotheke mycare.  
Pharmazeutische Fachkräfte unserer Apotheke beraten Sie gern zu Fragen  
rund um das Produkt - per E-Mail: [service@mycare.de](mailto:service@mycare.de) oder per Telefon:  
0800-8770120 gebührenfrei. Alle Informationen: [www.mycare.de](http://www.mycare.de)

[Zum Produkt »](#)

# Protefix<sup>®</sup>

## Haft-Creme

**PREMIUM**  
für Voll- und Teilprothesen

### Protefix Haft-Creme Extra-Stark Premium

- 1. Nass-Haftkraft:** Direkt auf die feuchte Prothese auftragbar
- 2. Extra-Stark:** Prothesenhaftung mit Langzeitwirkung
- 3. Pflegefaktor:** Vitamin E schützt die Zellen
- 4. Krümelschutz:** Effiziente Randabdichtung gegen Eindringen von Speiseresten unter die Prothese
- 5. Tragekomfort:** Dank elastischer Polsterung zwischen Zahnfleisch und Prothese
- 6. Kräuterkraft:** Mit Myrrhe-/Salbei-/Kamille-Formel
- 7. Milde Frische:** Angenehm mild-frischer Minzgeschmack

**Premium-Rezeptur: Ohne Zinksalz, ohne Konservierungsstoffe.**  
Für Voll- und Teilprothesen geeignet.

**Anwendung:** Prothese reinigen und **Protefix Haft-Creme Premium** in Abständen auf die nasse Prothese auftragen. Die Prothese einsetzen und einige Sekunden fest andrücken. Nach Gebrauch bitte die Tube sorgfältig verschließen; die Öffnung dabei sauber und trocken halten.

**Zusammensetzung:** **Protefix Haft-Creme Premium** enthält:  
Cellulose Gum (27 %), Calcium/Sodium PVM/MA Copolymer (26 %), Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Silica, Chamomilla Recutita, Tocopheryl Acetate, Commiphora Myrrha, Salvia Officinalis, Menthyl Lactate, Mentha Crispa, CI 14720.

**Bitte Gebrauchsanweisung beachten.**



  
**Queisser**  
PHARMA

GmbH & Co. KG  
Schleswiger Str. 74  
24941 Flensburg