



Beipackzettel online - ein Service Ihrer Versandapotheke mycare.  
Pharmazeutische Fachkräfte unserer Apotheke beraten Sie gern zu Fragen  
rund um das Produkt - per E-Mail: [service@mycare.de](mailto:service@mycare.de) oder per Telefon:  
0800-8770120 gebührenfrei. Alle Informationen: [www.mycare.de](http://www.mycare.de)

[Zum Produkt »](#)

- EarliBird ist zu über 99 % zuverlässig ab dem Fälligkeitstag der Periode
- EarliBird kann bis zu 3 Tage früher testen vor der ausgebliebenen Periode
- EarliBird liefert ein schnelles Testergebnis ob Sie schwanger oder nicht schwanger sind

## 1 GEBRAUCHSANWEISUNG

### Wie funktioniert der Test?

Mit beginnender Schwangerschaft produziert die sich bildende Plazenta das Hormon HCG (Human-Chorion-Gonadotropin). **EarliBird Schwangerschaftstest** weist das Vorhandensein des Hormons auch in geringer Konzentration (25mIE/ml) im Urin nach. Daher ist der Schwangerschaftstest besonders geeignet, eine Schwangerschaft bereits ab dem Fälligkeitstag der Periode festzustellen. In Laboruntersuchungen erzielt **EarliBird Schwangerschaftstest** eine Genauigkeit von 99%. **EarliBird Schwangerschaftstest** prüft schnell, sicher und zuverlässig, ob eine Schwangerschaft besteht. **EarliBird Schwangerschaftstest** kann bereits ab dem ersten Tag des Ausbleibens der Periode und zu jeder Tageszeit angewendet werden. Er liefert Ihnen bereits nach einer Minute ein zuverlässiges Ergebnis. Im Falle eines positiven Testergebnisses können Sie von einer Schwangerschaft ausgehen. Wenden Sie sich bitte an Ihren Gynäkologen und sprechen Sie mit ihm über Ihre Schwangerschaft und Ihr werdendes Kind. Ein negatives Testergebnis deutet darauf hin, dass kein HCG-Hormon im Körper vorhanden ist, womit die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft sehr gering ist. Sollte die Periode während der folgenden 7 Tage weiterhin ausbleiben, kann es hierfür mehrere Gründe geben: z.B. unregelmäßige Periode, falsch berechneter Zyklus, Stress, Flug- und Fernreisen oder eine bestehende Schwangerschaft. Für den Fall, dass die Periode auch nach 7 Tagen weiterhin ausbleibt, sollte ein weiteres Mal ein Schwangerschaftstest durchgeführt oder ein Gynäkologe aufgesucht werden.

## BEVOR SIE DEN TEST ANWENDEN

Lesen Sie die Beschreibung sorgfältig durch. Nehmen Sie den Test erst unmittelbar vor Anwendung aus der Schutzverpackung. Nehmen Sie eine Uhr zur Hand, um den Test richtig anzuwenden und das Testurteil rechtzeitig abzulesen.

## 2 ANWENDUNG

Nehmen Sie den EarliBird Schwangerschaftstest aus der Schutzverpackung und ziehen Sie die Schutzkappe ab. Drehen Sie den **EarliBird Schwangerschaftstest** so, dass der hyroskopische Teststab nach unten zeigt. Halten Sie den Teststab für mindestens 6 Sekunden direkt in den Urinstrahl. Stecken Sie den EarliBird Schwangerschaftstest mit der rosafarbenen Schutzkappe nach unten oder legen Sie ihn auf eine gerade Oberfläche – die Testfenster sollten nach oben zeigen. 1 Minute nach Durchführung des EarliBird Schwangerschaftstests kann bereits ein positives Ergebnis (schwanger) abgelesen werden. Um sicher zu gehen, dass ein angezeigtes negatives Ergebnis (nicht schwanger) – kein Streifen im Testfenster – auch wirklich negativ ist, überprüfen Sie das Ergebnis nach 5 Minuten erneut. Nach 10 Minuten ist das angezeigte Ergebnis nicht mehr aussagekräftig.

### Anzeigefenster

- **Kontrollfenster:** Das **kleine ovale** Fenster ist das Kontrollfenster. An diesem erkennen Sie, ob der Test ordnungsgemäß funktioniert hat.
- **Testfenster:** Das **große runde** Fenster ist das Testfenster. An diesem erkennen Sie das Testergebnis.



## WICHTIG

Halten Sie das Teststäbchen während der Durchführung niemals mit der saugfähigen Testspitze nach oben.



Richtig

Falsch

## 3 WARTEN SIE 1 – 5 MINUTEN. Während der Test arbeitet, erscheinen pinkfarbene Linien.

## 4 AUSWERTUNG IHRES ERGEBNISSES

Unabhängig davon, ob Sie schwanger sind oder nicht, erscheint nach der angegebenen Wartezeit im **Kontrollfenster ein pinkfarbener Streifen**. Dieser gibt an, dass der **EarliBird Schwangerschaftstest** ordnungsgemäß funktioniert hat. Falls im Kontrollfenster kein pinkfarbener Streifen erscheint, kann es sein, dass der hyroskopische Teststab nicht ausreichend Urin absorbieren konnte oder ein anderer Fehler in der Anwendung gemacht wurde. In diesem Fall sollten Sie die Anwendungshinweise erneut sorgfältig durchlesen und einen neuen **EarliBird Schwangerschaftstest** verwenden, um auf eine eventuell bestehende Schwangerschaft zu testen. Keinesfalls kann der bereits verwendete Teststab ein zweites Mal verwendet werden. In seltenen Fällen kann man bei fehlender Anzeige im Kontrollfenster von einem fehlerhaften Test ausgehen. Die Farbe der Streifen im Kontroll- und Testfenster reicht von blassrosa bis zu einem kräftigen violett. Sie ist von der Konzentration des im Urin vorhandenen Hormons HCG abhängig. Die Intensität der Farbe hat keinen Einfluss auf das Testergebnis.

- **Schwanger:** Erscheint im Testfenster (großes rundes Fenster) ein pinkfarbener Streifen, so können Sie davon ausgehen, dass Sie schwanger sind. Dies ist auch der Fall, wenn nach 5 Minuten Wartezeit nur ein sehr blasser rosafarbener Streifen sichtbar ist.
- **Nicht Schwanger:** Erscheint im Testfenster (großes rundes Fenster) nach der angegebenen Wartezeit nach 1 – 5 Minuten kein Streifen, so können Sie davon ausgehen, dass Sie nicht schwanger sind.

2 pinkfarbene Linien  
schwanger1 pinkfarbene Linie  
nicht schwanger



mit sich  
färbender  
Testspitze

- EarliBird ist zu über 99 % zuverlässig ab dem Fälligkeitstag der Periode
- EarliBird kann bis zu 3 Tage früher testen vor der ausgebliebenen Periode
- EarliBird liefert ein schnelles Testergebnis ob Sie schwanger oder nicht schwanger sind

**5 HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN**

**1. Wie lange ist das Testergebnis ersichtlich?**

Ein positives Ergebnis bleibt meist unverändert – es kann sich jedoch die Intensität des Farbstreifens ändern. Bei einem negativen Ergebnis kann nach 10 Minuten ein blasser Farbstreifen im Testfenster erscheinen – dies bedeutet jedoch nicht, dass das Ergebnis positiv ist. Aus diesem Grund darf das Ergebnis nach 10 Minuten nicht mehr interpretiert werden.

**2. Können Medikamente, empfängnisverhütende Präparate (Anti-Baby-Pille) oder Alkohol das Ergebnis beeinflussen?**

Alkohol kann das Testergebnis nicht beeinflussen. Die Einnahme empfängnisverhütender Präparate, Schmerzmittel, Antibiotika und Hormonpräparate sollte das Testergebnis ebenfalls nicht beeinflussen. Nur Medikamente, die das Hormon HCG beinhalten (wie z.B. Ovitrele, Pregnyl, Profasi etc.), können ein falsches Ergebnis liefern.

**3. Beeinflusst die Menge an Flüssigkeitszufuhr das Testergebnis?**

Übermäßige Flüssigkeitszufuhr kann den Urin verdünnen und dazu führen, dass das Vorhandensein von HCG im Urin nicht richtig dargestellt wird. Aus diesem Grund sollte die übliche zugeführte Menge an Flüssigkeit nicht überschritten werden oder der Schwangerschaftstest morgens verwendet werden.

**4. Was ist zu tun, wenn das Testergebnis positiv (schwanger) ist?**

Ein positives Testergebnis weist auf das Vorhandensein von HCG im Urin hin und bedeutet mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, dass Sie schwanger sind. Suchen Sie daher einen Gynäkologen auf, um wichtige Punkte für die Schwangerschaft zu besprechen.

**5. Was ist zu tun, wenn das Testergebnis negativ (nicht schwanger) ist?**

Ein negatives Testergebnis weist darauf hin, dass kein HCG im Urin gefunden wurde und bedeutet mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, dass Sie nicht schwanger sind. Wenn Sie in Bezug auf die Richtigkeit des Testergebnisses unsicher sind, können Sie nach Ablauf von 7 Tagen erneut einen Schwangerschaftstest durchführen. Wenn Sie auch dann ein negatives Testergebnis erhalten und Ihre Periode nach wie vor nicht eingesetzt hat, klären Sie das Ausbleiben der Periode bitte mit Ihrer/Ihrem Gynäkologen/in ab. Neben einer Schwangerschaft kann es auch andere Gründe für das Ausbleiben der Periode geben.

**WICHTIGE INFORMATIONEN**

1. Lagerung bei Raumtemperatur
2. Ausschließlich für in vitro Diagnose (nicht innerlich anwendbar)
3. Nicht wiederverwendbar
4. Nur bei genauer Befolgung der Gebrauchsinformation funktionstüchtig
5. Nicht nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums verwenden
6. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren
7. **EarliBird Schwangerschaftstest** ist eine sehr hohe Genauigkeit bei der Feststellung einer eventuell bestehenden Schwangerschaft auf. Sollte der Schwangerschaftstest ein unerwartetes oder unschlüssiges Ergebnis aufweisen, wenden Sie sich an einen Gynäkologen. Bestimmte Umstände, wie z.B. Eileiter- oder Bauchhöhlenschwangerschaften, können ein falsches Ergebnis liefern. Das Testergebnis kann außerdem direkt nach der Geburt fälschlicherweise als positiv ausgewiesen werden.

**Unerwartet Schwanger?**

Viele Fragen?  
**AKTION LEBEN e.V.** bietet kostenlose Beratung und Hilfe!  
Telefon: +49 6201 2046  
Telefax: +49 6201 23848  
[www.aktion-leben.de](http://www.aktion-leben.de)

IVD	Medizinisches Produkt für die In-vitro-Diagnostik	LOT	Batch-code	Nicht wiederverwenden	Gebrauchsanweisung beachten	Von Sonnenlicht fernhalten	
2°C - 30°C	Temperaturbegrenzung 2°C - 30°C		Verwendbar bis	Hersteller	Achtung: Wichtige Informationen	Trocken aufbewahren	
				REF	Artikelnummer	REP	Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft

Syntron Bioresearch Inc.  
2774 Locker Ave, West, Carlsbad,  
California 92009, USA

Emergo Europe  
Molenstraat 15 2513 BH  
The Hague • Netherlands



Hager Pharma GmbH  
Ackerstraße 1, 47269 Duisburg  
Germany  
[www.hager-pharma.de](http://www.hager-pharma.de)

**CE 0086**  
PZN D: 13511191  
PZN A: 4736560  
REF: 666 000