



Beipackzettel online - ein Service Ihrer Versandapotheke mycare.  
Pharmazeutische Fachkräfte unserer Apotheke beraten Sie gern zu Fragen  
rund um das Produkt - per E-Mail: [service@mycare.de](mailto:service@mycare.de) oder per Telefon:  
0800-8770120 gebührenfrei. Alle Informationen: [www.mycare.de](http://www.mycare.de)

[Zum Produkt »](#)



**THERMA**  
WÄRME-AUFLAGE  
**NACKEN**



**Zur vorübergehenden Linderung von leichten Muskel- und Gelenkschmerzen (z. B. Verspannungen und Muskelkrämpfe), sowie Schmerzen, die durch Überanstrengung, Zerrungen und Verstauchungen entstehen.**

**Gebrauchsanweisung für doc Therma Wärme-Auflage zur Linderung von Muskel- und Gelenkschmerzen im Nacken- und Schulterbereich**

**Liebe Anwenderin, lieber Anwender,**

**bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung von doc Therma Wärme-Auflage bei Nackenschmerzen beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen. Beachten Sie bitte besonders die unten aufgeführten Warnhinweise. Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen. Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.**

**Was ist doc Therma Wärme-Auflage und bei welchen Beschwerden wird doc Therma Wärme-Auflage angewendet?**

**doc Therma Wärme-Auflage** ist ein Medizinprodukt zur vorübergehenden Linderung von Muskel- und Gelenkschmerzen im Nacken- und Schulterbereich.

**Wirkungsdauer:** 12 Stunden. Die Wirkungsdauer variiert je nach Größe der Wärmeelemente. Für die Dauer der vorgesehenen Anwendung kommt es zu einer stabilen und gleichmäßigen Wärmeabgabe.

**Anwendung:** doc Therma Wärme-Auflage ist zur äußerlichen Anwendung vorgesehen. Durch Aufkleben der Auflage im Nacken- und Schulterbereich kommt es zu einer Wärmebehandlung der darunterliegenden Gewebestrukturen, z. B. der Muskeln. Mit seiner angenehmen und gut verträglichen Wärme lindert es Nackenschmerzen, beeinflusst Gelenkschmerzen positiv und entspannt die verkrampfte und strapazierte Muskulatur.

Die Wärme-Auflage enthält als Hauptbestandteil Eisenoxid, das beim Öffnen der Packung in Kontakt mit dem Sauerstoff aus der Luft kommt. Dabei läuft eine Reaktion ab, bei der Wärme entsteht. Weitere Bestandteile, die diese Reaktion unterstützen, sind Aktivkohle, Vermiculit, Natriumchlorid, Wasser und Superabsorber. Die Bestandteile befinden sich in unterschiedlich großen Kammern aus Vlies. Die Innenseite der Wärme-Auflage ist mit einer luftdurchlässigen Folie beschichtet, die regelt, wie schnell der Sauerstoff in den Vliesbeutel eindringen kann. Die Außenseite der Wärme-Auflage ist mit einem Schmelzkleber beschichtet, der für das Anheften der Auflagen während der Anwendung sorgt.

**Die wohltuende Wirkung von Wärme:**

Wärme ist eine bewährte Methode bei Muskel- und Gelenkschmerzen. Langzeit- und Tiefenwärme besitzen die Eigenschaft, verkrampfte Muskeln zu entspannen. Bei Gelenkschmerzen kann Wärme die Symptome, wie zum Beispiel Schmerzen, lindern.

**Wie ist doc Therma Wärme-Auflage anzuwenden?**

- Öffnen Sie zunächst die Kunststoffverpackung.
- Ziehen Sie das Papier von der Klebeseite des Wärme-pflasters vorsichtig ab.

- Legen Sie die Wärme-Auflage mit der Klebeseite auf die zur Anwendung vorgesehene Stelle auf die Haut.
- Drücken Sie die Wärme-Auflage gut an.
- Sie können die Wärme-Auflage 12 Stunden lang tragen, um einen optimalen Wirkeffekt zu erzielen.

**Was müssen Sie vor der Anwendung von doc Therma Wärme-Auflage beachten?**

 **doc Therma Wärme-Auflage darf nicht angewendet werden:**

- bei Kindern bis zum Alter von 12 Jahren
- während des Schlafs
- bei schlechter Durchblutung oder einer Herzkrankheit
- bei Diabetes oder rheumatoider Arthritis
- wenn Sie schwanger sind
- auf erkrankter, geschädigter, verletzter oder empfindlicher Haut
- an Körperstellen, an denen Wärme nicht wahrnehmbar ist
- in Verbindung mit medikamentenhaltigen Cremes, Lotionen oder Salben
- bei Verwendung anderer Wärmetherapien, einschließlich elektrischer Wärmequellen
- bei bettlägerigen Personen und Patienten mit einer Tendenz zu Hautgeschwüren
- bei Personen, die nicht in der Lage sind, die Wärme-Auflage selbstständig anzulegen oder zu entfernen, z. B. körperlich beeinträchtigte oder ältere Personen
- auf Blutergüssen oder Schwellungen, die innerhalb der letzten 48 Stunden entstanden sind
- wenn Ihr Arzt Ihnen aufgrund Ihres Gesundheitszustands von der Anwendung abrät

 **Warnhinweise**

doc Therma Wärme-Auflage ist ausschließlich im Nacken- und Schulterbereich anzuwenden und nur zur äußerlichen Anwendung.

Die Wärme-Auflage ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Unternehmen Sie keine Versuche, die Wärme-Auflage wieder aufzuwärmen. Die Reaktion, die Wärme im Pflaster freisetzt, kann nur einmalig ablaufen.

Die Wärme-Auflage darf nicht in der Mikrowelle erwärmt werden.

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Nicht verwenden, wenn die Wärme-Auflage beschädigt oder gerissen ist.

Wärmeprodukte können zu Verbrennungen führen! Prüfen Sie die Haut auf Anzeichen von Verbrennungen oder Blasen. Beenden Sie die Anwendung, wenn Sie ungewöhnliche Hautreizungen feststellen.

Brechen Sie die Anwendung sofort ab und suchen Sie einen Arzt auf, wenn es zu Unwohlsein, Brennen, Schwellungen, Ausschlag oder zu anderen Veränderungen der Haut während der Anwendung kommt.

Unterbrechen Sie die Anwendung und wenden Sie sich an einen Arzt, wenn sich die Schmerzen nach 7 Tagen Anwendung verschlimmern oder unverändert bleiben, da dies ein Hinweis auf eine Erkrankung sein könnte.

Das Risiko einer Hautverbrennung steigt im Alter. Bei empfindlicher oder reifer Haut ziehen Sie ein dünnes Kleidungsstück unter der Wärme-Auflage an.

Die Inhaltsstoffe können beim Verschlucken oder bei direktem Kontakt mit der Haut oder den Augen schädlich sein. In beiden Fällen sollte unverzüglich ärztlicher Rat eingeholt werden.

#### Bitte beachten Sie:

Die Wärme-Auflage ist für den einmaligen Gebrauch und zur äußerlichen Anwendung vorgesehen. Es ist normal, dass die Haut nach Entfernen der Auflage leicht gerötet ist. Falls die Haut nach einigen Stunden noch immer gerötet ist, sollte keine neue Wärme-Auflage verwendet werden, bis die Rötung vollständig abgeklungen ist. Brechen Sie die Anwendung ab, wenn sich die Wärme-Auflage zu heiß oder unangenehm anfühlt.



Jiangsu Hanyao Medical Devices Co.,Ltd.  
No. 4, Xingye Road,  
Ningjiang Industrial Park, Suining Xuzhou  
221200 Jiangsu  
Volksrepublik China



HÄLSA Pharma GmbH  
Maria-Goeppert-Straße 5  
23562 Lübeck  
Deutschland



**HERMES ARZNEIMITTEL GMBH**  
Georg-Kalb-Straße 5 - 8  
82049 Pullach i. Isartal  
Tel.: 089/79 102-0  
Fax: 089/79 102-280  
E-Mail: kontakt@hermes-arzneimittel.com



#### Wie ist doc Therna Wärme-Auflage aufzubewahren?

Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren. An einem kühlen, trockenen Ort und vor direktem Sonnenlicht geschützt lagern. Nicht nach Ablauf des angegebenen Verfalldatums verwenden. Im normalen Hausmüll entsorgen. Die Wärme-Auflagen dürfen NICHT verbrannt werden.

#### Weitere Informationen über doc Therna Wärme-Auflage

##### doc Therna Wärme-Auflage enthält:

Eisenoxid, Aktivkohle, Wasser, Vermiculit, Natriumchlorid, Superabsorber

##### Inhalt der Packung:

2er-Packung: 2 selbstklebende Wärme-Auflagen

4er-Packung: 4 selbstklebende Wärme-Auflagen



Zum einmaligen Gebrauch



Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist, und Gebrauchsanweisung beachten.



Medizinprodukt



Verwendbar bis:  
siehe Faltschachtel und Päckchen



Chargennummer:  
siehe Faltschachtel und Päckchen