



Beipackzettel online - ein Service Ihrer Versandapotheke mycare.  
Pharmazeutische Fachkräfte unserer Apotheke beraten Sie gern zu Fragen  
rund um das Produkt - per E-Mail: [service@mycare.de](mailto:service@mycare.de) oder per Telefon:  
0800-8770120 gebührenfrei. Alle Informationen: [www.mycare.de](http://www.mycare.de)

[Zum Produkt »](#)



**VEGAN**  
**DERMATOLOGISCH GETESTET**  
**HERGESTELLT MIT ÖKO-STROM**

**PREMIUM KONDOME**  
**MADE IN GERMANY**



Geprüft nach EN ISO 4074  
R MAT NR 5611682104A



**PRO NATURE**

Die Produktlinie **Ritex PRO NATURE** verbindet die hohen Qualitätsansprüche an das Medizinprodukt Kondom mit einer ökologisch nachhaltigen Produktion in Deutschland.



**Ritex PRO NATURE** Kondome werden aus FSC® zertifiziertem Naturkautschuklatex hergestellt. Das FSC®-Zeichen (Lizenzcode FSC® C152781) steht für einen ökologisch und sozial nachhaltigen Anbau von Naturkautschuklatex. In der Produktion kommt 100% Ökostrom zum Einsatz und das verwendete Erdgas wird über Klimazertifikate (ÖKOPLUS) zu 100% CO<sub>2</sub>-neutralisiert. Die verwendete Kartonage besteht aus 100% Karton aus Recyclingmaterial.

## Kondom-Gebrauchshinweise:

Stand: 12-2022



Siegelbriefchen **be-**  
**hutsam** an der **Zacken-**  
**kante** aufreißen.

Bitte beachten Sie,  
dass z. B. Fingernägel,  
Schmuck oder Piercings

im Intimbereich das Kondom  
beschädigen können.



Bevor Penis und Körper  
des Partners sich  
berühren, das Kondom  
über den steifen Penis  
abrollen. **Vorhaut ganz**  
**zurückziehen**. Reservoir

mit Daumen und Zeigefinger sanft  
zusammendrücken, **mit Abrollrand**  
**nach außen** auf die Eichel setzen  
und das Kondom vollständig  
abrollen.



Sobald der Penis zu  
erschaffen beginnt,  
das Kondom  
rutscht oder sehr  
spannt (Gefahr des  
Berstens), ziehen Sie

den Penis heraus. **Halten Sie dabei**  
**das Kondom am Penisansatz fest,**  
**damit es nicht abrutscht.** Sollte das

Kondom nach Verwendung ein Loch  
aufweisen oder gerissen sein, sobald  
wie möglich, jedoch innerhalb von 72  
Stunden, einen Arzt aufsuchen.

Ritex Kondome sind für die  
Anwendung beim vaginalen  
Geschlechtsverkehr bestimmte  
Medizinprodukte zur Empfängnis-  
verhütung und zum lokalen Infektio-  
nsschutz. Bei nicht vaginaler  
Anwendung ist das Risiko des Abrut-  
schens oder der Beschädigung  
höher. Keine Verhütungsmethode

kann einen 100%igen Schutz vor  
Schwangerschaft und Infektionen  
garantieren.

**Um mangelnde Gleitfähigkeit** zu  
beheben, ausschließlich nur solche  
Gleitmittel verwenden, die vom  
Hersteller für die Anwendung mit  
Latex-Kondomen empfohlen sind  
(z. B. Ritex Gleitmittel: BIO, GEL<sup>T</sup>,  
HYDRO SENSITIV oder LONGTIME).  
In ausreichender Menge auf die  
**Außenseite** des bereits über  
den Penis abgerollten Kondoms  
auftragen. Niemals zusätzliche  
Gleitmittel auf der Kondom-Innen-  
seite (zwischen Kondom und  
Penis) verwenden, da hierdurch  
das Kondom leichter abtrutschen  
oder reißen kann. Niemals öl- oder  
fetthaltige Gleitmittel (z. B. Vaseline,  
Babyöl, Körperlotion) verwenden.

Bei Anwendung von Arzneimitteln  
wie Zäpfchen, Salben, Cremes etc.  
im Intimbereich fragen Sie Ihren  
Arzt oder Apotheker, ob diese die  
Sicherheit des Kondoms beeinträch-  
tigen können.

Kondome nur in original verschlos-  
senen Siegelbriefchen bei  
Raumtemperatur aufbewahren.

Entsorgen Sie benutzte Kondome  
nur über den Hausmüll. Nicht ins WC  
werfen!

Wenn eine ungewollte Befruchtung  
oder Infektion zu befürchten ist, oder  
wenn bei der Kondombenutzung  
Unverträglichkeiten auftreten,  
fragen Sie Ihren Arzt oder inform-  
mieren Sie sich bei der Bundeszent-  
rale für gesundheitliche Aufklärung  
([www.bzga.de](http://www.bzga.de)).

## Bitte beachten Sie auch die nachstehenden Hinweis-Symbole auf der Verpackung



Bitte beachten Sie die aus-  
führlichen Hinweise auf diesem  
Beipackzettel.



Jedes Kondom nur einmal  
benutzen, da bei Wiederverwen-  
dung ein erhöhtes Risiko einer  
Beschädigung bzw. Infektion zu  
befürchten ist.



Nicht benutzen, wenn das  
Siegelbriefchen beschädigt ist.  
Kondome entsorgen und ein  
neues verwenden.



Kondome vor direktem Sonnen-  
licht und Hitze geschützt lagern.



Kondome trocken lagern.



Verfalldatum. Kondome nicht  
benutzen, wenn Verfalldatum  
überschritten.



Diese Kondome sind aus  
Naturkautschuklatex, der bei  
Latex-Allergikern allergische  
Reaktionen einschließlich eines  
anaphylaktischen Schocks her-  
vorrufen kann. Latex-Allergiker  
dürfen diese Kondome deshalb  
nicht benutzen.



Nummer der Kondomcharge



Hersteller



**Ritex GmbH**  
**Gustav-Winkler-Straße 50**  
**33699 Bielefeld · Germany**

\*Mehr Infos unter: [www.ritex.de](http://www.ritex.de)

