



Beipackzettel online - ein Service Ihrer Versandapotheke mycare.
Pharmazeutische Fachkräfte unserer Apotheke beraten Sie gern zu Fragen
rund um das Produkt - per E-Mail: service@mycare.de oder per Telefon:
0800-8770120 gebührenfrei. Alle Informationen: www.mycare.de

[Zum Produkt »](#)



Augen-Tropfen

Hyaluron 0,4%

Extra

NEU
Optimierte
Anwendung

Lindernde Wirkung bei trockenen Augen
Längere Befeuchtung durch quervernetzte
Hyaluronsäure
Ohne Konservierungsstoffe

Gebrauchsanweisung

Verwendungszweck:

- Wirken befeuchtend und erhöhen die Gleitfähigkeit auf der Augenoberfläche
- Lindern Rötungen, Ermüdung und Beschwerden der Augen, die durch äußere Einflüsse (Wind, Rauch, Schadstoffbelastungen, längere Sonneneinstrahlung, Meersalz und Wasser) sowie längere Bildschirmtätigkeit verursacht wurden
- Wirken lindernd bei Überbeanspruchung der Augen durch das Tragen von Kontaktlinsen
- Sind geeignet zum einfacheren Einsetzen und Entfernen von Kontaktlinsen

Zur häufigen Anwendung geeignet, auch mehrmals täglich bzw. nach ärztlicher Verordnung. Nach erstmaliger Anwendung kann die Sehfähigkeit kurzfristig beeinträchtigt sein. Auch kann als Folge der Augenreizung vorübergehend ein geringfügiges Brennen, ein Stechen oder eine Reizung auftreten. Sollten diese Wirkungen anhalten oder sich verschlimmern, informieren Sie bitte umgehend Ihren Arzt.

⚠ Warn- und Sicherheitshinweise:

- Das Produkt sollte nur von einer einzigen Person angewendet werden.
- Nur zur Verwendung am Auge.
- Nicht anwenden, wenn das Behältnis bereits vor dem ersten Gebrauch beschädigt oder nicht vollständig verschlossen ist.
- Berühren Sie bei der Anwendung nicht das Auge oder andere Oberflächen mit der Tropferspitze des Behältnisses.
- Die Sicht kann aufgrund der charakteristischen Viskosität des Produktes kurzfristig beeinträchtigt sein.
- Nicht anwenden bei bekannten Unverträglichkeiten gegen einen der Inhaltsstoffe.
- Bei auftretenden Nebenwirkungen brechen Sie die Behandlung ab und konsultieren Sie einen Arzt.
- Nach Verbrauch ist der Behälter ordnungsgemäß zu entsorgen.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Zusammensetzung:

Wässrige Natriumhyaluronat-Crosspolymerlösung (davon 0,4 % Natriumhyaluronat-Crosspolymer), Trometamol, Salzsäure (2N), Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke (WFI)

Doppelherz Augen-Tropfen Hyaluron 0,4 % Extra sind eine sterile Lösung ohne Konservierungsstoffe.

Doppelherz Augen-Tropfen Hyaluron 0,4 % Extra sind sterile Augen-Tropfen basierend auf einer patentierten Technologie quervernetzter Hyaluronsäure mit Urea.

Die quervernetzte Hyaluronsäure kann Wasser über einen verlängerten Zeitraum bereitstellen, wodurch die feuchtigkeitsspendende Wirkung gefördert wird.

Dies bietet eine stärkere und länger anhaltende, feuchtigkeitsspendende Wirkung bei Trockenheit, Reizung und Müdigkeit der Augen.

Die Formel wurde entwickelt, um bereits direkt nach der Anwendung maximalen Komfort zu bieten. Die Doppelherz Augen-Tropfen Hyaluron 0,4 % Extra sind für den täglichen Gebrauch, bei Tag und Nacht, geeignet.

Für eine dauerhafte, langanhaltende Befeuchtung der Augen.

Verpackung:

10 ml Mehrdosenbehältnis, ohne Konservierungsstoffe.

Angaben zur Aufbewahrung:
Zwischen 2 °C und 30 °C trocken lagern und von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.
Nach Anbruch 3 Monate verwendbar.

Haltbarkeit:

Bei ungeöffneter Verpackung: Nach Ablauf des auf der Verpackung und dem Mehrdosenbehältnis angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Hersteller:

COC Farmaceutici s.r.l.
Via Modena, 15
40019 - Sant'Agata Bolognese (Bo)
Italien


Vertrieb und Information:

Queisser Pharma GmbH & Co. KG
Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg
Deutschland

CE 1936
MEDIZINPRODUKT

Diese Gebrauchsanweisung wurde zuletzt überarbeitet 01.02. von 03/2018

Gebrauchshinweise: **NEU** optimierte Anwendung durch Soft-Touch Flasche

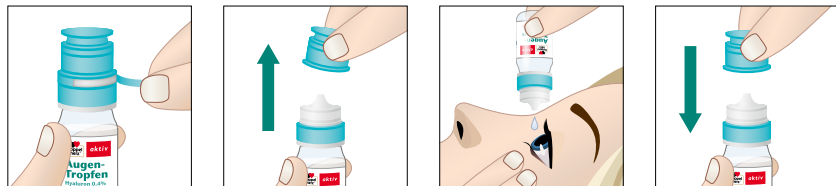

- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch den Originalitätsverschluss
- Entfernen Sie die Schutzkappe und öffnen Sie die Flasche
- Halten Sie die Flasche mit der Öffnung nach unten über das jeweilige Auge
- Ziehen Sie das Unterlid leicht nach unten

- Tropfen Sie durch leichtes Drücken auf die Flasche jeweils 1 oder 2 Tropfen in jedes Auge
- Die Schutzkappe nach Gebrauch wieder aufsetzen. Der Inhalt bleibt nach Anbruch 3 Monate haltbar
- Durch das allmähliche Leeren der Flasche kann ein höherer Druck zur Abgabe des Produktes nötig sein.

Queisser
PHARMA
GmbH & Co. KG
Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg
DEUTSCHLAND

