



Beipackzettel online - ein Service Ihrer Versandapotheke mycare.
Pharmazeutische Fachkräfte unserer Apotheke beraten Sie gern zu Fragen
rund um das Produkt - per E-Mail: service@mycare.de oder per Telefon:
0800-8770120 gebührenfrei. Alle Informationen: www.mycare.de

[Zum Produkt »](#)

Hansaplast® WUNDHEILSALBE

Unterstützt die natürliche Heilung von kleineren, oberflächlichen Wunden wie zum Beispiel Schnittwunden, Schürfwunden, Kratzern sowie Brandwunden 1. Grades und kleineren Brandwunden 2. Grades. Geeignet für Babys sowie geschädigte, gereizte, trockene oder empfindliche Haut.

- Bildet einen atmungsaktiven Schutzfilm, der die Wunde vor dem Austrocknen bewahrt.
- Schafft ein optimales, feuchtes Wundmilieu, das den natürlichen Wundheilungsprozess der Haut beschleunigt.
- Frei von Duft-, Farb- und Konservierungsstoffen sowie von tierischen Inhaltsstoffen.

Hansaplast® übliche Wundversorgung:

1. Eine saubere und gereinigte Wunde ist der erste Schritt für eine optimale Wundheilung. Reinigen Sie Ihre Wunde mit dem Reinigungsspray, um sie effektiv vor Wundinfektionen zu schützen.
2. Schützen Sie die Wunde vor äußeren Einflüssen wie Schmutz und Bakterien, um eine ungestörte Wundheilung zu ermöglichen. Decken Sie die Wunde mit einem Pflaster oder sterilen Wundverband von Hansaplast® ab.
3. Unterstützen Sie die natürliche Wundheilung und reduzieren Sie das Narbenrisiko durch regelmäßige Anwendung der Hansaplast® Wundsalbe bis zur vollständigen Wundheilung.

Anwendungshinweise:

- Blutung stoppen.
- Die Wunde oder den Hautbereich sanft reinigen und trocknen.
- Ein- bis zweimal am Tag vorsichtig einen dünnen Film der Salbe auftragen. Die Öffnung der Tube darf dabei nicht mit der Wunde in Kontakt kommen.
- Regelmäßig wiederholen, bis die Heilung abgeschlossen ist.
- Kann in jeder Phase des Heilungsprozesses angewendet werden.
- Wenn notwendig, die Wunde mit einem Pflaster, Wundverband oder einer Kompresse abdecken. Täglich wechseln, wenn nicht anders von Ihrem Arzt empfohlen.

Warnhinweise:

- Bei größeren Wunden mit viel Exsudat oder Zeichen einer Infektion sollte ein Arzt kontaktiert werden.
- Im Zweifel sollte bei Brandwunden ein Arzt aufgesucht werden, um den Schweregrad der Brandwunde festzustellen.
- Nur zur äußeren Anwendung an Wunden.
- Bei Rötung, Schwellung oder Schmerz im Wundbereich, wenn sich der Zustand verschlechtert oder wenn der Wundheilungsprozess nicht innerhalb weniger Tage einsetzt, sollte ein Arzt aufgesucht werden.
- Bei Schwangeren oder stillenden Müttern sowie bei Kindern unter 2 Jahren sollte vor der Anwendung ein Arzt aufgesucht werden.

Gegenanzeigen:

Nicht anwenden:

- In Kombination mit anderen lokal anzuwendenden Präparaten im gleichen Hautbereich.
- In Verbindung mit anionischen Tensiden, Seifen, Ölen, Gelen, etc.
- Bei bekannten Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe.
- Im Mittel- oder Innenohr und im Bereich der Augen.
- Bei einer allergischen Reaktion die Anwendung der Hansaplast® Wundheilsalbe beenden.
- Dauerhaft für mehr als 30 Tage.
- Nicht schlucken.

Nebenwirkungen:

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in seltenen Fällen eine Hautreizung oder ein Ausschlag während der Anwendung auftreten kann. Wenn Sie eine solche Reaktion oder andere Symptome bemerken, beenden Sie die Anwendung und wenden Sie sich an einen Arzt. Sollten Sie unerwartete oder potentiell schwerwiegende Symptome im Rahmen der Anwendung dieses Produktes beobachten, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, den Hersteller und Ihre nationale Gesundheitsbehörde.

Packungsgrößen:

Aluminiumtuben mit 3,5g, 20g, 50g, 100g. Möglicherweise sind nicht alle Verpackungsgrößen in allen Ländern zum Verkauf registriert.

Inhaltsstoffe:

Weißes Vaseline, Paraffinöl dünnflüssig, Ceresin, Glycerin, Panthenol, Glycerinstearat.

Lagerhinweise:

Bewahren Sie die Anwendungshinweise so lange auf, wie Sie das Produkt verwenden. Bei 5°C–30°C lagern. Tube nach Gebrauch fest verschließen. Nur unbeschädigte Tuben verwenden. Das Ablaufdatum und die Chargennummer sind in die Tubenfalz eingraviert. Nur bis zum Ablaufdatum nutzen. Nach dem Öffnen innerhalb von 6 Monaten verwenden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Letzte Überarbeitung der Anwendungshinweise v01-02/2020

Beiersdorf

Beiersdorf AG
20245 Hamburg, Germany
Hansaplast®/Hansaplast® Logo
=reg.tn.Beiersdorf AG, Germany

DE Hansaplast® Hotline: 040/4909-7570
(Es fallen Festnetzgebühren nach dem Tarif Ihres Telefonanbieters an.)
Made in Germany
DRV23903.1
www.hansaplast.de

CE 0124

