



Beipackzettel online - ein Service Ihrer Versandapotheke mycare.
Pharmazeutische Fachkräfte unserer Apotheke beraten Sie gern zu Fragen
rund um das Produkt - per E-Mail: service@mycare.de oder per Telefon:
0800-8770120 gebührenfrei. Alle Informationen: www.mycare.de

[Zum Produkt »](#)

Blephaclean®

Dieses Produkt ist ein Medizinprodukt. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Anwendung. Bewahren Sie diese Packungsbeilage auf. Sie möchten sie vielleicht noch einmal lesen.

ANWENDUNGSGEBIETE

BLEPHACLEAN wird zur täglichen Augenlidhygiene angewendet.

Nur zur Anwendung auf der Haut, direkten Kontakt mit den Augen vermeiden.

GEEIGNET FÜR

- Erwachsene,
- Kinder ab 3 Monaten: Die Eltern oder eine betreuende Person sollten das Produkt beim Kind anwenden.

GEGENANZEIGEN

Nicht anwenden, wenn Sie allergisch gegen einen der Inhaltsstoffe von BLEPHACLEAN sind (siehe Produktbeschreibung).

Da nicht genügend Daten vorliegen, verwenden Sie BLEPHACLEAN nicht, wenn Sie schwanger sind oder stillen, es sei denn, Ihr Arzt rät Ihnen dazu.

PRODUKTBESCHREIBUNG

BLEPHACLEAN sind sterile, mit einer Lotion getränkte Kompressen zur täglichen Augenlidhygiene.

Die Lotion enthält: Capryloylglycin, Natriumhyaluronat, PEG 8, Poloxamer 184, Polysorbat 20, Propylenglykol, Hydrokotleextrakt (Propylenglykol, Centella asiatica-Extrakt und Wasser), konservierungsmittelfreier sebumregulierender Komplex (Propylenglykol, Iris florentina-Wurzelextrakt, Zinksulfat, Alkohol, Natriumhydroxid oder HCl, Wasser), PEG-6-glycerol-caprylocaprat (d. h. Macrogol-6-glycerol-caprylocaprat), Dikaliumphosphat, Natriumhydroxid, Kaliumdihydrogenphosphat, gereinigtes Wasser. Die Farbe der Kompressen kann variieren. Dies ist normal und auf die natürlichen Pflanzenextrakte zurückzuführen.

NUTZEN, LEISTUNG UND WIRKUNGSWEISE

BLEPHACLEAN sind sterile Kompressen zur täglichen Augenlidhygiene, besonders:

- wenn Sie empfindliche Haut, Augenlider oder Augen haben;
- wenn Sie Staub, Pollen und Sekrete von den Augenlidern entfernen wollen. Dies könnte Teil Ihrer Augenpflege sein, wenn Sie eine Allergie haben oder unter einer Infektion der Augen leiden;
- wenn Sie eine Entzündung oder Infektion der Augenlider haben wie beispielsweise Blepharitis, Meibom-Drüsen-Fehlfunktion, Gersten- oder Hagelkorn. Diese Erkrankungen können zu Symptomen trockener Augen wie juckenden, brennenden und/oder geröteten Augen führen;
- wenn Sie Ihre Augenlider vor augenärztlichen Eingriffen wie therapeutischen Injektionen in das Auge (intravitreale Injektionen), refraktiver Augenlaserchirurgie (LASIK oder PRK) und Kataraktchirurgie reinigen müssen. Da es gut verträglich ist, kann BLEPHACLEAN auch nach der Operation auf Anraten Ihres Arztes oder Augenarztes angewendet werden.

BLEPHACLEAN reinigt und entfernt Staub, Pollen und Sekrete von den Augenlidern.

BLEPHACLEAN schützt die Haut um die Augen sowie die natürliche Bakterienflora der Haut.

Das Produkt wurde unter dermatologischer und ophthalmologischer Kontrolle getestet.

ALLGEMEINE ANWENDUNGSHINWEISE

DOSIERUNG:

Vor Augenoperationen **2-mal täglich** für 5 Tage anwenden oder wie von Ihrem Arzt oder Apotheker empfohlen.

In anderen Fällen **2-mal täglich** morgens und abends für 3 Wochen, anschließend 1-mal täglich für 3 Monate anwenden oder wie von Ihrem Arzt oder Apotheker empfohlen. Bei chronischen Augenliderkrankungen empfiehlt sich eine langfristige Augenlidhygiene.

Für die Verwendung von BLEPHACLEAN ist keine besondere Schulung erforderlich.

Wenn Sie Kontaktlinsen tragen, entfernen Sie diese vor der Anwendung von BLEPHACLEAN.

Waschen Sie sich vor der Anwendung gründlich die Hände.

Zum Öffnen reißen Sie die Verpackung auf (Abbildung 1) und entfalten Sie die innenliegende Komresse; verwenden Sie zum Öffnen keine Hilfsmittel.



Abbildung 1: Öffnen der Verpackung.

Wickeln Sie die Komresse um die Spitze Ihres Zeigefingers.

Halten Sie die Augen geschlossen und legen Sie die Komresse vorsichtig auf Ihre Augenlider und den Wimpernansatz (Abbildung 2).

Massieren Sie sanft mit kleinen kreisenden Bewegungen und entfernen Sie eventuelle Krusten, Sekrete oder Make-up.



Abbildung 2: Reinigen der Augenlider und Wimpern

Ziehen Sie vor einem Spiegel das Unterlid mit der anderen Hand vorsichtig nach unten und reiben Sie dann mit der um den Finger gelegten Komresse am unteren Lidrand entlang (Abbildung 3).

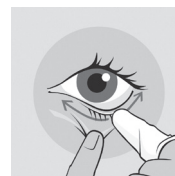


Abbildung 3: Reinigung des unteren Lidrands

Wiederholen Sie den Vorgang mit einer neuen Komresse am anderen Auge.

Nach der Anwendung von BLEPHACLEAN ist kein Nachspülen erforderlich.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Prüfen Sie vor dem ersten Gebrauch des Produktes, ob die Verpackung unversehrt ist: verwenden Sie das Produkt nur, wenn die Verpackung ungeöffnet ist.

Verwenden Sie jede Kompresse nur einmal, da sie sonst möglicherweise nicht gut reinigt und zu einem erhöhten Infektionsrisiko führen kann.

Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nicht verbessern, wenden Sie sich an medizinisches Fachpersonal.

WARNHINWEISE

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Vermeiden Sie es, BLEPHACLEAN in die Augen zu bekommen; Sie könnten ein brennendes Gefühl verspüren. Wenn dies geschieht, spülen Sie Ihre Augen mit sauberem Wasser oder Kochsalzlösung.

NEBENWIRKUNGEN

Die folgenden Nebenwirkungen wurden für BLEPHACLEAN berichtet: brennendes oder juckendes Gefühl für einige Minuten nach der Anwendung, Rötung oder Schwellung der Augenlider, Rötung der Augen, allergische Reaktionen. In solchen Fällen sollten Kontaktlinsenträger ihre Kontaktlinsen nicht wieder einsetzen.

Wenn Sie nach der Anwendung dieses Produkts Nebenwirkungen oder ungewöhnliche Empfindungen feststellen, wenden Sie sich bitte an medizinisches Fachpersonal und teilen Sie die Informationen dem lokalen Vertrieb, dem Hersteller oder der zuständigen Gesundheitsbehörde mit (siehe Kontaktdaten am Ende der Gebrauchsanweisung).

AUFBEWAHRUNG UND ENTSORGUNG

Zwischen 8°C und 25°C lagern.

Nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit aussetzen.

Entsorgen Sie die Kompresse sofort nach der Anwendung. Nach Ablauf des Verfallsdatums auf der Verpackung der Kompressen und dem Umkarton das Produkt nicht mehr anwenden.


Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag eines Monats, sofern die Verpackung unbeschädigt ist und das Produkt korrekt gelagert wurde.

Entsorgen Sie das Produkt verantwortungsbewusst und gemäß der lokalen Leitlinien (die Verpackung der Kompressen und die Kompressen sollten im Hausmüll entsorgt werden, der Umkarton und die Packungsbeilage sind recycelbar).

Erstellungsdatum und Version der

Gebrauchsanweisung: Vers. 5 08/2022

Hersteller:

 Laboratoires Théa
12 rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 Frankreich
www.laboratoires-thea.com
Abschnitt « Contact us »

Vertrieb:






Théa Pharma GmbH
Schillerstraße 3
10625 Berlin Deutschland
www.theapharma.de
Tel. 030 / 315 18 98-0

Gesundheitsbehörde:

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3
53175 Bonn Deutschland
www.bfarn.de

 0459

BEDEUTUNG DER SYMBOLE AUF DER VERPACKUNG

	Hersteller
	Fertigungslosnummer, Charge
	Herstellungsdatum
	Verwendbar bis
	Temperaturbegrenzung
	Strahlen-sterilisiert
	Medizinprodukt
	Gebrauchsanweisung beachten
	Nicht wiederverwenden
	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden
	Achtung
	Vor Sonnenlicht schützen
	Trocken aufbewahren
	Artikelnummer
	Eindeutige Produktidentifizierung