



Beipackzettel online – ein Service Ihrer Versandapotheke mycare.
Pharmazeutische Fachkräfte unserer Apotheke beraten Sie gern zu Fragen
rund um das Produkt – per E-Mail: service@mycare.de oder per Telefon:
0800-8770120 gebührenfrei. Alle Informationen: www.mycare.de

[Zum Produkt »](#)



Basic AUGENTROPFEN

Augentropfen mit
Natriumhyaluronat 2 mg/ml

Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie diese Information und das Etikett sorgfältig durch, sie dient dazu das Produkt richtig anzuwenden. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf.

Leistungsmerkmale

Befeuchtung und Linderung bei trockenen und müden Augen. Natriumhyaluronat 2 mg/ml hilft trockene Augen und Reizungen zu lindern. Benetzungsmittel für alle Arten von Kontaktlinsen. Erhöht den Komfort beim Tragen von Kontaktlinsen, Zur Wiederherstellung der Befeuchtung und Augenbenetzung.

Eigenschaften

Die innovative, biologisch sehr gut verträgliche, Formulierung mit Polymeren, stellt die Befeuchtung, Benetzung und Verträglichkeit, u.a. beim täglichen Tragen von Kontaktlinsen wieder her.

Indikation

Befeuchtung, Linderung bei trockenen, müden Augen.
Die Augentropfen bewirken lang anhaltende Linderung bei geröteten, gereizten, brennenden, schmerzenden, juckenden und trockenen Augen:

Beispielsweise durch Klimaanlage, Heizung, Luftverschmutzung, Wind- und Sonnenexposition, Sport, äußerster Konzentration beim Lernen und Arbeiten, Gebrauch von Kontaktlinsen, Traumareaktion nach Operationen, Fremdkörper, Computerarbeit und Müdigkeit.

Die Augentropfen sind geeignet zur Erhöhung der Gleitfähigkeit und der Befeuchtung, sowohl weicher als auch harter, luftdurchlässiger Kontaktlinsen.

Anwendung

- Vor der Anwendung die Hände gründlich reinigen.
- Geben Sie durch vorsichtiges Zusammendrücken der Flasche 1 – 2 Tropfen in jedes Auge.
- Das Produkt kann täglich, je nach Bedarf mehrmals, auch beim Tragen von Kontaktlinsen, verwendet werden.
- Zur Befeuchtung der bereits mit Kombilösung desinfizierten Kontaktlinsen, entnehmen Sie diese aus dem Aufbewahrungsbehälter und geben 2 – 3 Tropfen auf die Kontaktlinsen und setzen diese in das Auge ein. Die Kontaktlinsen können auch nach dem Einsetzen zur Erhöhung der Gleitfähigkeit mit der Lösung benetzt werden, geben Sie hierfür 1 - 2 Tropfen in jedes Auge.

Gegenanzeigen

Nicht anwenden bei einer Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.

10501F017
REV. 2021/01/04
800003

Vorsichtsmaßnahmen

- Nach Anbruch 3 Monate verwendbar.
- Nicht verwenden, wenn der Originalitätsverschluss beschädigt ist.
- Bitte vermeiden Sie den Kontakt der Tropferspitze mit der Augenoberfläche oder anderen Gegenständen, um Verunreinigungen zu vermeiden.
- Die Flasche nach der Anwendung gut verschließen.
- Die Flasche nicht in der Nähe von Wärmequellen und bei maximal 30° C aufbewahren.
- Nach Ablauf des Verfalldatum nicht mehr benutzen.

Hinweise

- Nicht anwenden bei einer Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht durch ein anderes Befeuchtungsprodukt ersetzen.
- Ziehen Sie einen Spezialisten zu Rate, bevor Sie Augenarzneimittel jeglicher Art, während des Tragens der Kontaktlinsen, verwenden.

Nebenwirkungen

Bei Beschwerden oder anhaltender Reizung, die Anwendung abbrechen und medizinischen Rat einholen.

Zusammensetzung

Polyhexamethylenbiguanid 0,00023%, Natriumhyaluronat (macromolekular) 0,2%, Dinatriumedetat 0,1%, Tenside 0,0015%, hergestellt bis zu 100% mit Hilfsstoffen und gereinigtem Wasser.

Haltbarkeit ab Herstellung: 3 Jahre, wenn unbeschädigt und richtig aufbewahrt.



Optima Pharmazeutische GmbH,
Ludwigstr. 49, DE-85399
Hallbergmoos



ESOFORM s.r.l.
Viale del Lavoro, 10
IT-45100 Rovigo



STERILE A



Hersteller

STERILE A

Sterilisiert mit aseptischen Verfahren



Verfallsdatum

LOT

Chargennummer



Gebrauchsanweisung beachten



Nicht verwenden, wenn die Verpackung, beschädigt ist

MD

Medizinprodukt



Gebrauchsanweisung beachten



Maximale Lagertemperatur



Nicht in der Nähe von Wärmequellen aufbewahren



Vertriebspartner

Stand der Information: 2021/01/04

10501F017
REV. 2021/01/04
800003