



Beipackzettel online - ein Service Ihrer Versandapotheke mycare.  
Pharmazeutische Fachkräfte unserer Apotheke beraten Sie gern zu Fragen  
rund um das Produkt - per E-Mail: [service@mycare.de](mailto:service@mycare.de) oder per Telefon:  
0800-8770120 gebührenfrei. Alle Informationen: [www.mycare.de](http://www.mycare.de)

[Zum Produkt »](#)

Gebrauchsanweisung

# BLUpan® intense

Steriles, hypotones ophthalmisches Gel mit 0,4 % Natriumhyaluronat

10 ml Flasche

Ohne Konservierungsstoffe

**BLUpan® intense** ist ein Medizinprodukt, das zum Schutz und zur Befeuchtung der Augenoberfläche durch einen Schutzfilm dient.

## ZUSAMMENSETZUNG

Natriumhyaluronat, Borsäure, Natriumtetraborat-Decahydrat, Kolliphor P 407, Wasser.

## WAS IST **BLUpan® intense**?

Eine Flasche **BLUpan® intense** enthält 10 ml sterile, hypertone ophthalmische Geltropfen ohne Konservierungsstoffe.

Dank seiner innovativen Rezeptur, hat **BLUpan® intense** die Eigenschaft mit Wärme zu verdicken: in der Flasche ist es eine flüssige Lösung, aber wenn in das Auge eingebracht, kann der Geltropfen durch seine zähflüssige Beschaffenheit besser an der Augenoberfläche haften und damit Befeuchtung und Schutz des Auges sicherstellen.

## WANN IST **BLUpan® intense** ANZUWENDEN?

**BLUpan® intense** ist ein steriles, hypotones ophthalmisches Gel ohne Konservierungsstoffe, das zur Linderung der Symptome von trockenen Augen angezeigt ist.

Natriumhyaluronat bildet eine Schutzschicht auf der Hornhautoberfläche, die das Auge befeuchtet und schützt und die Verdunstung vom Tränenfilm verlangsamt. Natriumhyaluronat besteht aus Zuckerketten, die sich auf der Hornhautoberfläche verteilen und eine Struktur bilden die Wassermoleküle einfangen kann. Diese Eigenschaft befeuchtet und schützt die Augenoberfläche.

**BLUpan® intense** ist besonders zur Behandlung von trockenen Augen mit erhöhter Verdunstung von Tränenfilm oder verminderter Produktion von Tränenflüssigkeit angezeigt.

## WIE IST **BLUpan® intense** ANZUWENDEN?

- Waschen Sie sich die Hände gründlich, bevor Sie **BLUpan® intense** anwenden.
- Kippen Sie Ihren Kopf leicht nach hinten und ziehen Sie das Unterlid Ihres Auges nach unten, um eine kleine Tasche zu bilden.
- Halten Sie die Flasche senkrecht über Ihrem Auge und schauen Sie in Richtung der **blauen** Spitze der Flasche.
- Drücken Sie die Flasche sanft, um einen Tropfen in das betroffene Auge einzuführen. Für die beste Befeuchtungswirkung halten Sie anschließend die Augen für mindestens 30 Sekunden geschlossen.
- Stellen Sie sicher, dass die Flaschenspitze weder Ihr Auge noch Ihre Finger berührt.
- Nach Gebrauch ordnungsgemäß mit der Verschlusskappe verschließen.
- Verabreichen Sie einen oder zwei Tropfen in jedes Auge, alle drei bis vier Stunden, oder wie vom Arzt/von der Ärztin verordnet.



## WARNHINWEISE

- Wenden Sie **BLUpan® intense** nicht an, wenn eine Überempfindlichkeit bekannt ist oder Sie gegen einen der Bestandteile allergisch sind.
- Falls eine Augenirritation auftritt, beenden Sie die Anwendung von **BLUpan® intense** und fragen Sie Ihren Arzt/Ihre Ärztin um Rat.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht nach Ablauf des Verfallsdatums.
- Innerhalb von 8 Wochen nach Anbruch verwenden.
- Fern von direkter Hitze, an einem kühlen, trockenen Ort mit einer Temperatur von 9 bis 25°C lagern. Unter Einfluss von Hitze, neigt die Flüssigkeit dazu, sich in ein Gel zu verwandeln, was die Abgabe erschwert. Es reicht aus, die Flasche für einige Minuten an einen kalten Ort zu stellen, um die Lösung wieder in leicht zu verabreichende Tropfen umzuwandeln.



1



2



3



4



5

Abbildung 1: Bei Raumtemperatur ist das Produkt flüssig.

Abbildung 2: Das Produkt direkt ins Auge geben.


Abbildung 3: Der Temperatur des Auges ausgesetzt, neigt die Lösung dazu sich in ein Gel zu verwandeln.

Abbildung 4: Halten Sie die Augen nach der Anwendung für mindestens 30 Sekunden geschlossen.

Abbildung 5: Um wieder eine Flüssigkeit zu erhalten, stellen Sie das Produkt für einige Minuten in den Kühlschrank.

- Nicht einnehmen.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Stellen Sie sicher, dass die Flaschenspitze weder Ihr Auge noch Ihre Finger berührt.
- Teilen Sie **BLUpan® intense** mit niemanden.
- Nach Verabreichung des Produkts kann es zu vorübergehendem verschwommenem Sehen und einem Gefühl von klebrigen Augen kommen. Dies ist auf die starke Gelbildung des Produkts, die zum besten Schutz Ihrer Augen dient, zurückzuführen. Um von der vollen Befeuchtungswirkung zu profitieren, ist es deshalb empfohlen, die Augen für mindestens 30 Sekunden geschlossen zu halten.
- Entfernen Sie Kontaktlinsen, bevor Sie **BLUpan® intense** anwenden, da sonst die Oberfläche der Kontaktlinsen beeinträchtigt werden könnte. Warten Sie mindestens dreißig Minuten, bevor Sie sie wieder einsetzen.
- Falls Sie auch andere Augentropfen oder -salben benutzen, lassen Sie mindestens dreißig Minuten zwischen jeder Anwendung verstreichen.
- Bitte warten Sie einige Minuten, bevor Sie einer Tätigkeit nachgehen, die klare Sicht erfordert.
- Falls Sie schwanger sind oder stillen, fragen Sie Ihren Arzt/Ihre Ärztin, bevor Sie **BLUpan® intense** anwenden.
- Normalerweise ist das Produkt für eine kontinuierliche Anwendung über maximal dreißig aufeinander folgende Tage vorgesehen; bitten Sie Ihren Arzt/Ihre Ärztin um Rat, falls sich Ihre Symptome nicht verbessern.

**LOT**

Chargen-Nummer und  „verwendbar bis“ sind auf dem Etikett und der Faltschachtel eingeprägt.

**STERILE A**

aseptische Herstellung.



Beschreibung und Art der Anwendung siehe beigefügte Gebrauchsanweisung.



Lagerungstemperatur.



Nicht verwenden bei beschädigter Flasche oder Siegelring.



**Hersteller:**  
**NTC S.r.l.**  
Via Luigi Razza 3  
20124 Milano  
Italy

**Vertrieb in Deutschland:**  
Pharma Stulln GmbH  
Werksstraße 3  
92551 Stulln  
Germany



**CE** 0426