



Beipackzettel online - ein Service Ihrer Versandapotheke mycare.
Pharmazeutische Fachkräfte unserer Apotheke beraten Sie gern zu Fragen
rund um das Produkt - per E-Mail: service@mycare.de oder per Telefon:
0800-8770120 gebührenfrei. Alle Informationen: www.mycare.de

[Zum Produkt »](#)

Liebe Anwenderin, lieber Anwender,

bitte lesen Sie folgende Gebrauchsanweisung aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollen. Heben Sie diese Gebrauchsanweisung auf, vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Vagisan Pflgendes Gleitgel

– Gebrauchsanweisung –

Zur Verbesserung der Gleitfähigkeit beim Intimverkehr

Bestandteile

Paraffinum Liquidum (67 %), Caprylic/Capric Triglyceride (13 %), Polyethylene, Laureth-4, Glyceryl Oleate, PEG-20 Glyceryl Triisostearate.

Vagisan Pflgendes Gleitgel enthält keine Konservierungs-, Farb- und Duftstoffe oder Bestandteile tierischen Ursprungs.

Anwendungsbereich

Vagisan Pflgendes Gleitgel ist ein Medizinprodukt und wird angewendet zur Verbesserung der Gleitfähigkeit beim Intimverkehr, wenn die Vagina zu trocken ist.

Eine Anwendung ist auch während der Schwangerschaft und Stillzeit möglich.

Erläuterungen:

Trockenheit beim Intimverkehr kann u. a. entstehen:

- durch Stress,
- durch Anwendung von hormonellen Verhütungsmitteln (z. B. „Pille“),
- nach Operationen an der Vagina, der Gebärmutter oder den Eierstöcken,
- durch Abnahme der Sexualhormonproduktion, z. B. in den Wechseljahren.

Bei Trockenheit im Scheideneingang und in der Vagina ist das Gleitvermögen beim Intimverkehr oft so beeinträchtigt, dass es zu Schmerzen und Anspannung kommen kann.

Produktinformationen

Vagisan Pflgendes Gleitgel verbessert die Gleitfähigkeit und sorgt für ein angenehmes Gleitgefühl beim Sex. Es trocknet nicht aus und klebt nicht. Geschmeidige Lipide schützen vor Reibung und pflegen die Haut. Durch seinen anhaltenden Gleiteffekt erleichtert es den

Intimverkehr und schützt vor Schmerzen auf Grund von Trockenheit.

Das Gel ist sehr gut verträglich und hat keine Auswirkungen auf die Spermienbeweglichkeit, daher kann es auch bei Kinderwunsch eingesetzt werden.

Vagisan Pflgendes Gleitgel lässt sich leicht abwaschen und hinterlässt keine bleibenden Flecken auf Bettwäsche und Kleidung.

Anwendungsweise

Vagisan Pflgendes Gleitgel wird vor dem Intimverkehr mit den Fingern dünn im Scheideneingang oder direkt auf dem Penis aufgetragen.

Mögliche Nebenwirkungen

In Einzelfällen können vorübergehend leichte Unverträglichkeitsreaktionen (z. B. Juckreiz, Brennen, Rötung) auftreten. Wenn Sie weitere unangenehme Wirkungen beobachten, sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt oder Apotheker.

Bitte melden Sie alle schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse dem Hersteller und der zuständigen Behörde Ihres Landes.

Hinweise zur Verwendung mit anderen Produkten

Vagisan Pflgendes Gleitgel darf nicht gleichzeitig mit Kondomen aus Latex, Polyisopren oder Polyurethan angewendet werden. Die Reißfestigkeit und Dichtigkeit dieser Kondome können vermindert werden, so dass deren Schutzwirkung nicht mehr gewährleistet ist. Auch die Schutzwirkung von Diaphragmen kann durch das Gel beeinträchtigt werden.

Das Gel ist nicht als Gleitmittel für medizinische Katheter, Schläuche oder Sonden geeignet; es wurde für diese Zwecke nicht getestet.

Lokale Wechselwirkungen zwischen Vagisan Pflgendes Gleitgel und anderen Produkten, die im gleichen Anwendungsgebiet (Vagina, Penis) angewandt werden, können nicht ausgeschlossen werden. Das Gel sollte daher nicht gleichzeitig mit solchen Produkten verwendet werden.

Anwendungsbeschränkungen

Vagisan Pflgendes Gleitgel darf bei bekannter Überempfindlichkeit oder bei Allergie gegen einen der Bestandteile nicht angewendet werden.

Unmittelbar nach einer Entbindung soll das Gleitgel nicht angewendet werden. Auch bei Vorliegen einer Scheideninfektion (z. B. Scheidenpilz) sollte es nicht verwendet werden; in diesem Fall sollte der Arzt aufgesucht werden.

Weitere Hinweise

Da Vagisan Pflgendes Gleitgel keine Spermizide (d. h. Substanzen, die Spermien abtöten) enthält, bietet es keinen Schutz vor einer ungewollten Schwangerschaft.

Das Gel wurde nicht für Oralsex getestet und kann daher nicht für diesen Zweck empfohlen werden.

Bei Überschreitung der in der Gebrauchsanweisung empfohlenen Dosierung sind keine schädlichen Wirkungen zu erwarten. Eine Überdosierung kann gegebenenfalls zu vermehrtem Scheidenausfluss und lokalen Hautreizungen führen.

Warnhinweise im Falle einer Beschädigung des Produkts

Wenn die Tube beschädigt ist oder wenn sich das Aussehen des Gels verändert hat, verwenden Sie das Produkt nicht und informieren Sie den Hersteller.

Aufbewahrung und Haltbarkeit

Das Produkt ist für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

Die Tube ist verschlossen und nicht über 25 °C zu lagern. Das Verfallsdatum ist auf der Lasche der Verpackung bzw. auf dem Tubenfalz aufgedruckt. Verwenden Sie das Produkt nicht mehr nach diesem Datum.

Nach Anbruch ist das Gel über einen Zeitraum von 12 Monaten haltbar.

Entsorgung

Wenn Vagisan Pflgendes Gleitgel nicht mehr benötigt wird, kann es im Hausmüll entsorgt werden.

Packungsgrößen

Tube mit 50 g Gel in einem Umkarton.

Hersteller

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel
Sudbrackstraße 56
33611 Bielefeld

Tel.: +49 (0)521 8808-05

Fax: +49 (0)521 8808-334

E-Mail: aw-info@drwolffgroup.com

Medizinprodukt








CE 0483

Datum der Überarbeitung des Textes

Juli 2025

DR·WOLFF

Bedeutung der Symbole auf dem Umkarton und der Tube:

						
Chargenbezeichnung	Verwendbar bis	CE-Kennzeichen	Gebrauchsanweisung beachten	Lagerung nicht über 25 °C	Hersteller	Medizinprodukt