



Beipackzettel online - ein Service Ihrer Versandapotheke mycare.

Pharmazeutische Fachkräfte unserer Apotheke beraten Sie gern zu Fragen rund um das Produkt - per E-Mail: service@mycare.de oder per Telefon: 0800-8770120 gebührenfrei. Alle Informationen: www.mycare.de

[Zum Produkt »](#)

HYALURON AUGENTROPFEN

- MEDIZINPRODUKT -

WEPA
DIE APOTHEKENMARKE

GEBRAUCHSINFORMATION

BESCHREIBUNG:

Die Augeneroberfläche ist von einer flüssigen Struktur bedeckt, die als Tränenfilm bezeichnet wird und verschiedene Funktionen erfüllt. Sie fungiert unter anderem als Gleitmittel und dient der Hydratation, Nährstoffversorgung, Reinigung und vor allem dem Schutz der Augeneroberfläche. Dieser Tränenfilm setzt sich aus drei Schichten zusammen:

- Schleimschicht, die am weitesten innen gelegen ist.
- Wässrige Schicht, die die Zwischenschicht bildet.
- Lipidschicht, die außen gelegen ist.

Die äußere Lipidkomponente wird von bestimmten Drüsen, den so genannten Meibom-Drüsen, abgesondert und bildet eine Barriere entlang des Lidrands und auf der Augeneroberfläche, die den Tränenfilm einschließt, ihn vor Verdunstung schützt und die physiologische Hydratation des Auges aufrechterhält.

Die Exposition gegenüber verschiedenen Faktoren, Stoffen oder mikrobiellen Erregern aus der Umwelt können zu einer Schädigung dieser Lipidschicht führen. Ist der Tränenfilm beschädigt, kann er seine Funktion als Schutzbarriere auf der Augeneroberfläche nicht mehr erfüllen. Dies führt zu einer stärkeren Exposition gegenüber externen Reizstoffen. Bei prädisponierten Personen lösen beispielsweise Pollen, Staub oder Tierhaare nach Kontakt mit der Augeneroberfläche die Symptome einer allergischen Bindehautentzündung aus, d. h. Augenbrennen, verstärkter Tränenfluss und starker Juckreiz.

WEPA Hyaluron Augentropfen ist ein Medizinprodukt, das zur Befeuchtung der Augeneroberfläche bei Benetzungsstörungen geeignet ist. Es stellt die natürliche Barrierefunktion der Lipidkomponente des Tränenfilms gegen Umwelteinflüsse wieder her und hilft so Reizungen durch äußere Einflüsse zu lindern.

Das Produkt ist steril und ohne Konservierungsstoffe, was zudem Augenreizungen vorbeugt.

Kann mit Kontaktlinsen verwendet werden. Für Erwachsene und Kinder (ab 3 Jahren) geeignet.

Nach dem Tropfen kann die Flasche einige Minuten lang leicht verformt bleiben, sie nimmt dann wieder ihre ursprüngliche Form an. Aufgrund der Eigenschaften der Flasche kann es notwendig sein, dass sie mit zunehmender Leerung stärker zusammengedrückt werden muss, um den gesamten Inhalt entleeren zu können.

ZUSAMMENSETZUNG:


Liposomen (0,5 %), Hyaluronsäure (0,1 %), Perilla-Extrakt, Zitronensäure-Monohydrat, tri-Natriumcitrat-Dihydrat, Natriumchlorid, gereinigtes Wasser.

FUNKTIONSWEISE:

Das Produkt hilft dabei, die Symptome von Benetzungsstörungen zu lindern (Entzündung, Reizung, Rötung, Brennen, Juckreiz, Tränen). Die Liposomen regulieren, unterstützt durch die Hyaluronsäure, die Gleiteigenschaften der Augeneroberfläche und stabilisieren die Lipidschicht des Tränenfilms, wodurch die natürliche Barrierefunktion gegen Umwelteinflüsse wiederhergestellt wird. Außerdem enthält es Perilla-Extrakt mit antioxidativen Eigenschaften.

ANWENDUNG:

3- bis 4-mal täglich 1 bis 2 Tropfen in jedes Auge tropfen. Waschen Sie sich gründlich die Hände.

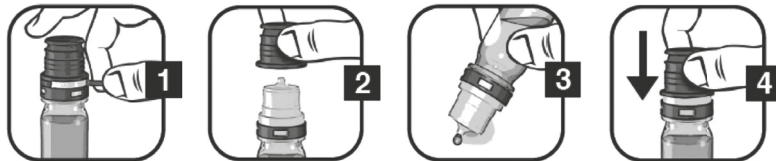

1. Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch das Garantiesiegel.
2. Öffnen Sie die Flasche, indem Sie die Schutzkappe abnehmen.
3. Geben Sie, soweit nicht anders verordnet, in jedes Auge 1 bis 2 Tropfen. Drehen Sie hierzu die Flasche auf den Kopf und drücken Sie sie leicht zusammen.
4. Verschließen Sie die Flasche nach dem Einträufeln sofort mit der zugehörigen Kappe.

WECHSELWIRKUNGEN MIT ARZNEIMITTELN:

Es sind keine Wechselwirkungen mit Arzneimitteln bekannt. Nach der Anwendung dieser Augentropfen sollte mindestens 15 Minuten gewartet werden, bevor andere Augenprodukte (Arzneimittel oder Medizinprodukte) in das Auge gegeben werden. Die gleichzeitige orale Verabreichung anderer Medizinprodukte, Arzneimittel oder Nahrungsergänzungsmittel mit diesen Augentropfen sollte nur unter ärztlicher Aufsicht erfolgen.

VERPACKUNG:

Die Packung besteht aus einer Flasche zur mehrfachen Anwendung mit OSD-Verschluss (Ophthalmic Squeeze Dispenser), die 10 ml des konservierungsmittelfreien Produkts enthält.

GEGENANZEIGEN:

Verwenden Sie das Produkt nicht bei bekannter Empfindlichkeit oder Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe.

VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARNHINWEISE:

- Waschen Sie sich vor der Anwendung des Produkts gründlich die Hände.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn eine Unverträglichkeit gegenüber einem der Bestandteile der Formulierung bekannt ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie überempfindlich oder allergisch auf einen oder mehrere Bestandteile reagieren.
- Die Spitze der Flasche darf weder die Augenoberfläche noch eine andere Oberfläche berühren.
- Verschließen Sie die Flasche nach Gebrauch wieder gut.
- Im Falle unerwünschter Reaktionen brechen Sie die Behandlung sofort ab, sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber und informieren Sie den Hersteller.
- Jeder schwerwiegende Zwischenfall im Zusammenhang mit dem Produkt muss dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient ansässig ist, unverzüglich gemeldet werden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass das Produkt richtig verschlossen und nicht beschädigt ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Flasche beschädigt ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr nach dem auf der Verpackung angegebenen Verfalldatum.
- 90 Tage nach dem Anbruch darf die Flasche nicht mehr verwendet werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht länger als 30 aufeinander folgende Tage.
- Außerhalb der Reichweite und Sichtweite von Kindern aufbewahren.
- Die Anwendung bei Kindern sollte von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Sprechen Sie zuerst mit Ihrem Arzt, wenn Sie schwanger sind oder stillen.
- Von Wärmequellen fernhalten.
- Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren.
- Nicht verschlucken.
- Das Produkt ist ausschließlich zur äußeren Anwendung bestimmt.
- Das Produkt ist nur zur Anwendung am Auge bestimmt.



Medizinprodukt



s. Faltschachtel und Produktetikett



Vor Sonnenlicht fernhalten



Einfaches Sterilbarriersystem



Lesen Sie vor dem Gebrauch die Gebrauchsinformation.



UDI



Vor Feuchtigkeit geschützt aufbewahren



Nach dem Gebrauch nicht in die Umwelt entsorgen



s. Faltschachtel und Produktetikett



REF WEALPLVN010



25°C
5°C
Lagertemperatur




10 ml



s. Faltschachtel und Produktetikett



0C01

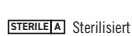

STERILE Sterilisiert



0051

WEPA

DIE APOTHEKENMARKE

Vertrieb durch:

WEPA Apothekenbedarf

GmbH & Co KG, D-56204 Hillscheid,

T +49 (0)2624 107-361

www.wepa-apothekenbedarf.de



Hersteller:

Nirial Pharma srl

Via Rovani, 7 - 20123 Mailand (IT)

Überarbeitung: 09/2022