



Beipackzettel online - ein Service Ihrer Versandapotheke mycare.  
Pharmazeutische Fachkräfte unserer Apotheke beraten Sie gern zu Fragen  
rund um das Produkt - per E-Mail: [service@mycare.de](mailto:service@mycare.de) oder per Telefon:  
0800-8770120 gebührenfrei. Alle Informationen: [www.mycare.de](http://www.mycare.de)

[Zum Produkt »](#)

# SAGELLA®

poligyn 50+

## Intensive Feuchtigkeit Vaginalgel

### Vaginalgel für schnelle und anhaltende Linderung bei Scheidentrockenheit


**Sagella® poligyn 50+ Intensive Feuchtigkeit Vaginalgel** ist ein hormonfreies, feuchtigkeitsspendendes Vaginalgel, das entwickelt wurde um mit dem Körper harmonisch zusammenzuarbeiten. Scheidentrockenheit kann zu Beschwerden und Reizungen führen und tritt bei den meisten Frauen gelegentlich auf – insbesondere während hormoneller Veränderungen (z.B. in den Wechseljahren), bei Müdigkeit, Stress oder als Nebenwirkung bestimmter Medikamente. **Sagella® poligyn 50+ Intensive Feuchtigkeit Vaginalgel** enthält Hyaluronsäure (HA), einen wichtigen Bestandteil der natürlichen Vaginalflüssigkeit. Es unterstützt den Körper dabei, die natürliche Feuchtigkeit im Scheidenbereich wieder herzustellen. Die besonders leichte Formulierung sorgt dafür, dass Sie sich wieder „natürlich“ und wohl fühlen. Das Gel ist transparent, geruchlos, klebt nicht und ist einfach anzuwenden.

### Hinweise zur Anwendung

Verwenden Sie das **Sagella® poligyn 50+ Intensive Feuchtigkeit Vaginalgel** morgens oder abends (verwenden Sie bei Bedarf eine Slipeinlage). Brechen Sie die Tubenspitze durch Drehen ab. Setzen oder legen Sie sich in eine bequeme Position und führen Sie das schmalere Ende des Applikators (der Tube) vorsichtig soweit wie möglich in die Vagina ein. Drücken Sie sanft auf das breitere Ende

der Tube, um das feuchtigkeitsspendende Gel in die Vagina einzubringen. Entfernen Sie die Tube vorsichtig während sie diese gedrückt halten und entsorgen Sie diese anschließend.

Drehen Sie die Kappe, um diese zu entfernen

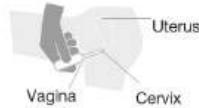

Um Trockenheit entgegenzuwirken, verwenden Sie das Produkt täglich an fünf aufeinanderfolgenden Tagen und reduzieren Sie die Anwendung dann je nach Bedarf auf zwei- bis dreimal pro Woche.

**Sagella® poligyn 50+ Intensive Feuchtigkeit Vaginalgel** kann mit Kondomen aus Polyisopren und Polyurethan angewendet werden.

**Sagella® poligyn 50+ Intensive Feuchtigkeit Vaginalgel** kann nicht mit Kondomen aus Naturkautschuklatex angewendet werden.

### Achtung

Bei Auftreten einer Reizung die Anwendung nicht fortsetzen. Im Zweifelsfall fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

### Warnhinweise

**Sagella® poligyn 50+ Intensive Feuchtigkeit Vaginalgel** ist kein Verhütungsmittel. Nicht verwenden, wenn die Tube beschädigt oder das Ende abgebrochen ist. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht anwenden, wenn eine Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe vorliegt. Nicht verwenden, wenn das Verfallsdatum der Tube überschritten ist. Nicht für die Verwendung durch oder an Kindern bestimmt.

Bitte melden Sie vermutete schwerwiegende Vorfälle mit diesem Produkt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, da dies für die kontinuierliche Überwachung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses des Produkts wichtig ist.

**Inhaltsstoffe:** Phosphatgepufferte Kochsalzlösung, Natriumhya-

luronat (Hyaluronsäure), Phenoxyethanol, Methylparaben. Hormonfrei

### Unabhängige Anwendungsstudie

Eine Studie bei 54 Anwenderinnen über 50 Jahren ergab: 56 % stellten innerhalb von 1 Minute und 98 % innerhalb von 1 Stunde nach Anwendung von **Sagella® poligyn 50+ Intensive Feuchtigkeit Vaginalgel** eine Linderung fest.

### Nach einer Anwendung

stellten 87 % der Anwenderinnen eine Linderung für bis zu 12 Stunden fest  
stellten 57 % der Anwenderinnen eine anhaltende Linderung für bis zu 24 Stunden fest  
stellten 25 % noch 24 Stunden nach der Anwendung eine vollständige Linderung fest

### Nach fünf täglichen Anwendungen

stellten 81 % der Anwenderinnen an Tag 7 eine vollständige Linderung fest\*  
stellten 48 % der Anwenderinnen an Tag 9 eine vollständige Linderung fest  
waren 42 % der Anwenderinnen an Tag 14 immer noch beschwerdefrei

\* 2 Tage nach Beendigung der Anwendung des Produkts



### Hersteller und Händler

 Rolf Kullgren AB,  
Ågatan 4, 646 30 Gnesta, Sweden

 Cooper Consumer Health Deutschland GmbH  
Gottlieb-Daimler-Straße 2, 68165 Mannheim, Deutschland

[www.sagella.de](http://www.sagella.de)

44169